

Klicken Sie auf die Menüleiste, **Einstellungen**, **Eingabeeinstellungen** und dann auf **Touchfunktion**.



## Aktivieren

Bei der Auswahl **Touchfunktion nicht verwenden** kann keine Zelle durchs Berühren des Bildschirms ausgelöst werden.

Mit **Aktivieren der zuletzt berührten Zelle** wird die Zelle ausgelöst, die Sie zuletzt berührt haben.

Mit **Aktivieren der ersten berührten Zelle** wird nur die Zelle ausgelöst, die Sie zuerst berühren.

**Berühren und Halten** löst die Zelle aus, wenn Sie die Einstellung **Zum Aktivieren berühren und halten** auswählen. Die Aktivierungszeiten und die Form der Fortschrittsanzeige für den Verweilclick können eingestellt werden.

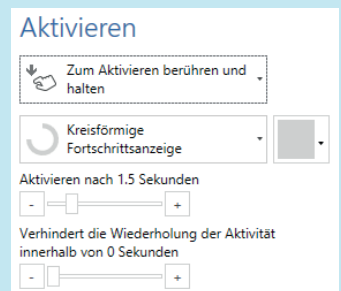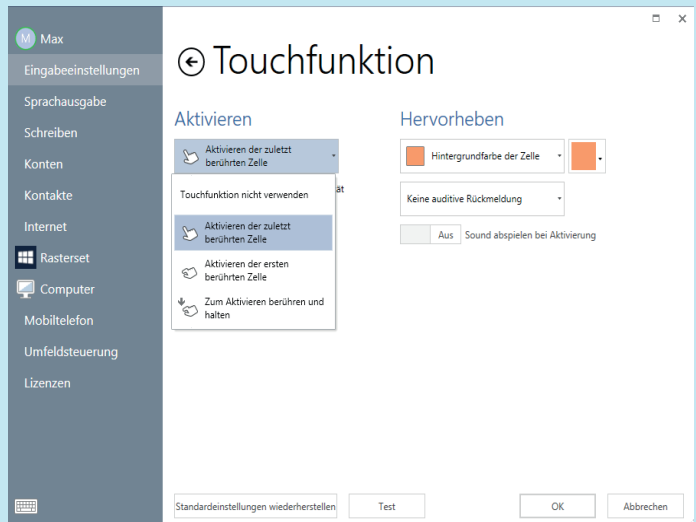

# Einstellungen Touch

## Hervorheben

Neben der optischen Hervorhebung kann auch die akustische Hervorhebung dazu beitragen, Menschen mit Sehbehinderung die Bedienung zu erleichtern.

**Auditive Beschreibung sprechen** nutzt die Stimme in der auditiven Rückmeldung (siehe 3.3), um den Inhalt der markierten Zelle auszulesen.

**Ton abspielen** – spricht den Inhalt der markierten Zelle.

Sie können auch einen Ton abspielen, wenn die Zelle aktiviert ist.

## Tastatur

Tippen Sie auf das Tastatur-Symbol, um die Tastatur aufzurufen. Dies ist wichtig, wenn die Einstellungen per Touch erfolgen.

### ★ Tipp

Einen Rechtsklick lösen Sie per Touch durch Berühren und Halten aus.

