

# Einstellungen Augensteuerung




Ist eine Augensteuerung installiert, klicken Sie bitte auf die Menüleiste, **Einstellungen, Eingabeeinstellungen** und dann auf **Augensteuerung**.

## Kamera

Wählen Sie Ihre Augensteuerung im Drop-Down-Menü aus.

Wählen Sie aus, wie Sie die Kamera nutzen wollen. (Die Auswahl steht nicht für alle Kameras zur Verfügung). Bei Bedarf stellen Sie die Glättung ein.

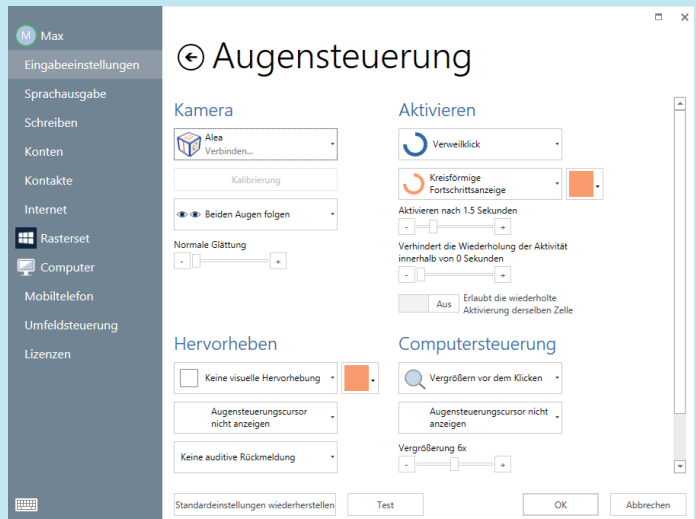

## Aktivieren

Aktivieren Sie das Auslösen mit Verweilklick, Blinzeln oder Schalter drücken. Verschiedene Einstellmöglichkeiten stehen für jede Methode zur Verfügung.

## Vergrößern vor dem Klicken

Vergrößern vor dem Klicken vergrößert einen Bereich für die punktgenaue Auswahl. Die Vergrößerung und die Zeit können eingestellt werden.

# Einstellungen

# Augensteuerung

## Kalibrierung

Um eine genaue Auswahl mit der Augensteuerung vornehmen zu können, ist eine Kalibrierung hier erklärt am Beispiel des myGaze-Systems.

Bevor Sie die Kalibrierung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Position zu der Augensteuerung haben. Das animierte Gesicht im Fenster sollte lächeln. Wenn Sie zu nah oder zu weit entfernt sind, wird das Gesicht rot.



In der Kalibrierung müssen Sie den Punkten folgen. Sie können auch ein eigenes Bild wählen – unter **Zielpunkt**, wählen Sie **Benutzer-Bild** dann **Durchsuchen**.

**Anzahl der Kalibrierungspunkte** – Wählen Sie z.B. 2, 5 oder 9. Mehr Punkte führen zu einer höheren Genauigkeit.

Wählen Sie aus, ob die Kalibrierung automatisch von Punkt zu Punkt fortschreiten soll oder manuell.

Die Geschwindigkeit kann hier ebenfalls eingestellt werden. Zum Starten klicken Sie auf **Kalibrieren**.

Nachträglich können Sie die Kalibrierung für einzelne Punkte oder insgesamt verbessern.