


Zugänglichkeit der Zelle



Wählen Sie im **Bearbeitungsmodus** eine Zelle aus und klicken in der Registerkarte **Startseite** auf **Zugänglichkeit der Zelle**.

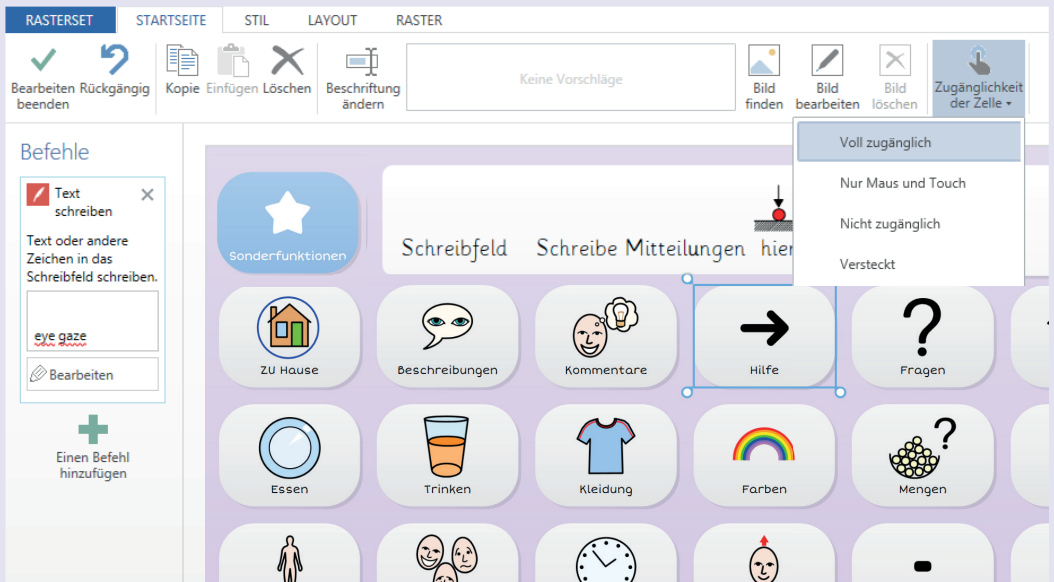

Voll zugänglich

Dies ist die Standardeinstellung. Die Zelle ist sichtbar und reagiert auf alle Zugriffsmethoden.

Nur Maus und Touch

Die Zelle ist nur mit der Maus oder dem Touchscreen zugänglich. Dies kann nützlich sein, wenn Sie z.B. eine Reihe von Einstellungszellen für die Augensteuerung erstellen wollen. Dies würde einem Helfer ermöglichen, schnell Dinge wie die Verweilzeit anzupassen, ohne dass diese Zellen zufällig durch den Benutzer mit den Augen ausgelöst würden.

Zugänglichkeit der Zelle

Nicht zugänglich

Die Zelle wird sichtbar, aber "grau", um anzuzeigen, dass auf sie nicht zugegriffen werden kann. Dies könnte verwendet werden, um sicherzustellen, dass Aktivitäten auf bestimmte Zellen während des Lernens fokussiert sind.




Versteckt

Die Zelle erscheint nicht im Raster, außer im Bearbeitungsmodus. Dies ermöglicht es Ihnen, ein komplettes Raster zu erstellen, aber den Inhalt dem Benutzer stufenweise vorzustellen, um diesen nicht zu überfordern.

Zellensichtbarkeit

Standardmäßig werden keine leeren Zellen angezeigt. Um sie sichtbar zu machen, klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf die Registerkarte **Layout** dort auf **Zellensichtbarkeit**.

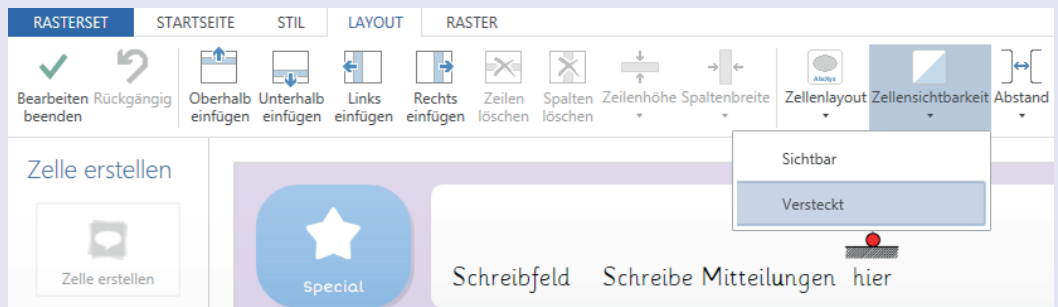

Smartbox

thinksmartbox.com