


# Klänge Hinzufügen




Um eine Zelle zu erstellen, die einen Ton wiedergibt, können Sie entweder aus der in Grid 3 erstellten Bibliothek von Klangeffekten wählen, eine Sounddatei auf Ihrem Computer verwenden oder einen Ton mit einem Mikrofon aufnehmen.

Wählen Sie im Bearbeitungsmodus unter **Zelle erstellen** die Kategorie **Musik, Video und Ton** und klicken Sie nun auf **Audiodatei abspielen** und danach **OK**.

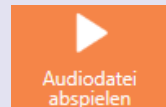

## Verwenden Sie einen Sound aus der Effektbibliothek

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, dann auf **Effekte**. Navigieren Sie nach Kategorie zum gewünschten Effekt. Klicken Sie auf **Abspielen** und dann auf **OK**.

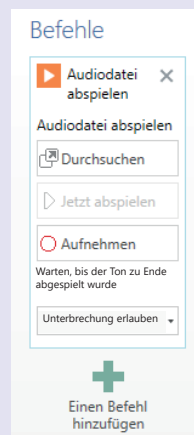


## Verwenden einer vorhandenen Audiodatei

Klicken Sie auf **Tondatei**, danach auf **Durchsuchen**. Navigieren Sie zu der Datei und klicken Sie auf **OK**.

### ★ Tipp

Sie können mehrere Befehle zu einer einzelnen Zelle hinzufügen. Sie können zum Beispiel einen Soundeffekt spielen und auch zu einem anderen Raster springen. Klicken Sie einfach auf **Einen Befehl hinzufügen**.

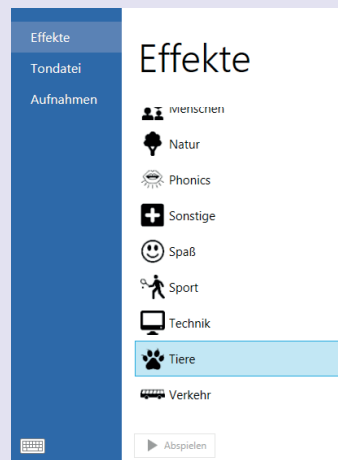


# Aufnehmen eines Tons

## Nehmen Sie eine Audiodatei auf

Um eine einzelne Audiodatei für diese Zelle aufzuzeichnen, können Sie einfach auf **Aufnehmen** klicken. Stoppen Sie die Aufnahme, wenn Sie fertig sind, und hören Sie das Ergebnis mit Abspielen an.

## Aufnahme einer Reihe von Tönen

Wenn Sie ein ganzes Raster aus Soundeffekten erstellen und mehrere Aufnahmen machen möchten, können Sie diese schneller aufnehmen.

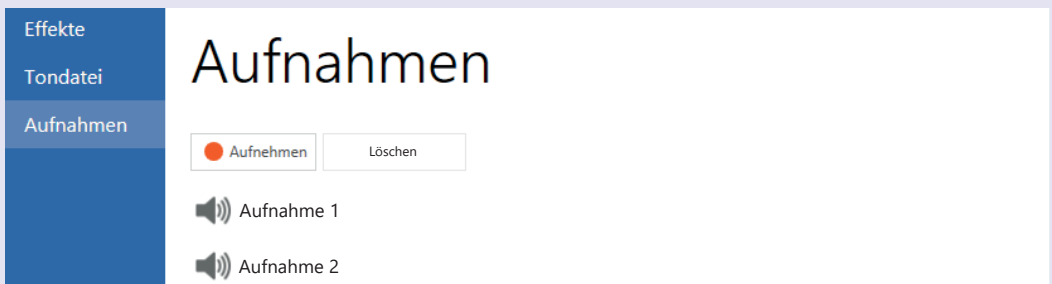

Klicken Sie im Befehl Audiodatei abspielen auf **Durchsuchen**, dann auf **Aufnahmen**. Drücken Sie **Aufnehmen** und dann **Aufnahme beenden**, sobald Sie Ihre Töne aufgenommen haben.

Wiederholen Sie diesen Schritt für so viele Töne, wie Sie aufnehmen möchten. Diese Reihe von Aufzeichnungen ist nun verfügbar für den Einsatz in anderen Zellen, indem Sie auf **Durchsuchen**, danach **Aufnahmen** klicken.

Spielen Sie einen beliebigen Ton ab, indem Sie ihn markieren, und **Abspielen** drücken.

### ★ Tipp

Um eine Ihrer Aufnahmen umzubenennen, markieren Sie sie und klicken auf den Namen. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken die Eingabetaste.