



Einstellungen Schalter



Klicken Sie auf die Menüleiste, **Einstellungen**, **Eingabeeinstellungen** und dann auf **Schalter**.

Wählen Sie Ihre gewünschte Scanning-Methode:
Variable Scan-Gruppen, **Vier Scan-Richtungen** oder **Feste Scan-Gruppen**.


Weitere Einstellmöglichkeiten stehen je nach Scanning-Methode zur Verfügung.

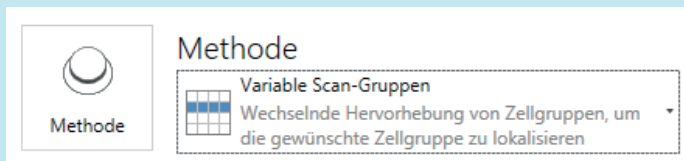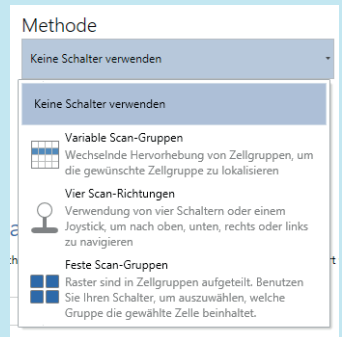

Konfiguration

Klicken Sie auf **Anschluss** und legen im Drop-Down-Menü fest, wie die Schalter angeschlossen sind.

Nutzen Sie ein Scanmodul, wählen Sie **Scan-Modul/Joystick** aus. Sie können auch **Tastatur**, **Maus** oder **Weiteres Eingabegerät** auswählen. Oder nutzen Sie einfach Ihren Bildschirm als Schalter. Zum Testen drücken Sie den Schalter – Sie sollten jetzt den aktiven Schalter in grün erkennen.

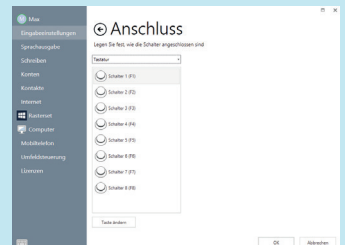

★ Tipp

Filtern Sie **Versehentliches Drücken** aus.

Einstellungen

Schalterscanning

Scanning-Intervall

Wählen Sie die Art des Scannens aus – **Einzel-**, **Zeile-Spalte** oder **Block-Scanning**.

Wählen Sie aus, wie das Scannen ausgelöst werden soll. – automatisch oder manuell nach jedem Schalterdruck. **Scan-Blöcke** kann man im Bearbeitungsmodus durch Markieren selbst festlegen.

Hervorheben

Sie können während des Scans die markierte Zelle farblich oder durch Vergrößerung hervorheben. Auch eine auditive Rückmeldung ist möglich.


Aktivieren


Wählen Sie aus, mit welchem Schalter Sie die Auswahl treffen möchten.

Befehle

Befehle können den entsprechenden Schaltern zugeordnet werden. Auf diese Weise können Sie fast jeden Befehl in Grid 3 mit einem Tasterdruck auslösen.

Scanning-Intervall

 Erst Zeilen, dann Zellen scannen

 Automatisches Vorwärtsscannen

Scanning-Intervall
Nicht verfügbar


Scanning-Intervall 1.5 Sekunden

-  +

Warten von zusätzlichen 0.5 Sekunden für das erste Element

-  +

Hervorheben


 Hintergrundfarbe der Zelle

Keine auditive Rückmeldung

☐ Aus Sound abspielen bei Aktivierung

☐ An Ausgrauen der Zellen, die nicht ein Teil der aktuellen Zeile, Spalte oder Scan-Blocks sind

Aktivieren

 Aktivieren
Schalter 1

Aktivieren nach 2 Sekunden

-  +

☐ Aus Richtungswechsel und Aktivieren der Schalter während des Scannens

☐ Aus Automatischer Scan-Start

☐ Aus Wiederholung der vorherigen Auswahl mit Schalteraktivierung

☐ Aus Vor der Aktivierung rückwärts Scannen

Scanning-Intervall Rückwärts 1.5 Sekunden

-  +