

# Einstellungen Maus- oder Kopfsteuerung




Klicken Sie auf die Menüleiste, **Einstellungen**,  
**Eingabeeinstellungen** und dann auf **Mauszeiger**.

## Aktivieren

Wählen Sie aus, wie die Zelle aktiviert werden soll – z.B. Klicken, Halten, Verweilen oder Schalter drücken.


Weitere Optionen wie Zeit oder Verweildauer stehen je nach Art der Aktivierung zur Verfügung.

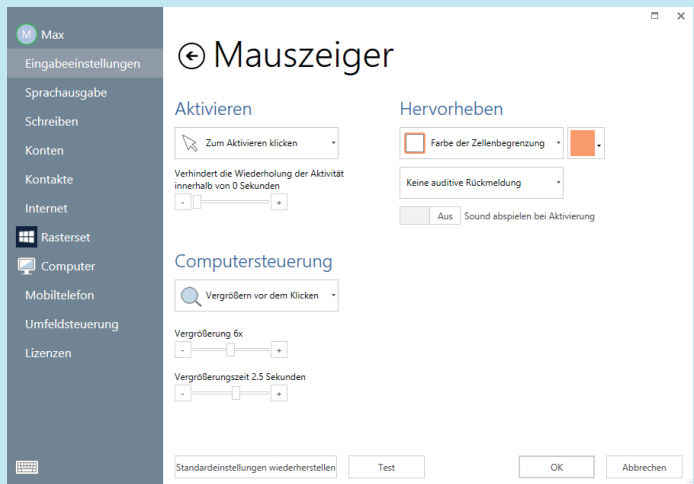

Versehentliches Auslösen kann durch den Regler **Verhindert die Wiederholung der Aktivität** ausgeschlossen werden.

## Hervorheben

Wählen Sie aus, wie die Zellen hervorgehoben werden sollen. Sie können die Farbe der Zelle, des Hintergrundes und des Zellrahmens ändern oder die Zellen vergrößern.

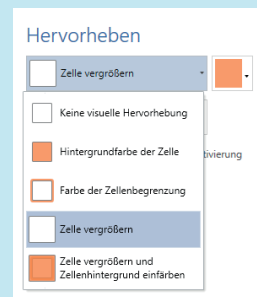


# Einstellungen

## Maus- oder Kopfsteuerung

### Computersteuerung

**Computersteuerung** enthält Optionen für die Steuerung der Maus in Grid 3, um das Bedienen von anderen Programmen oder des Desktops zu ermöglichen.

Wählen Sie aus zwischen **Nicht klicken**, **Verweilklick**, **Schalter drücken zum Klicken** oder **Vergrößern vor dem Klicken**.

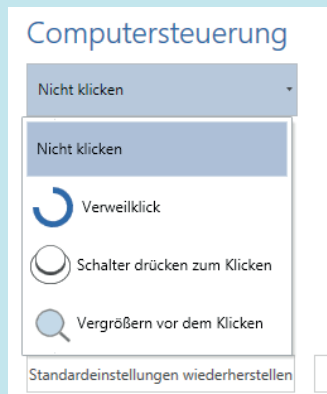

### Vergrößern vor dem Klicken

**Vergrößern vor dem Klicken** erlaubt Ihnen, eine punktgenaue Auswahl zu treffen. Die Vergrößerung des Bereiches und die Vergrößerungszeit können eingestellt werden.

Diese Methode ist auch für die Augensteuerung verfügbar.

