

# Einstellungen Rasterset




Öffnen Sie das Rasterset, dessen Einstellungen Sie ändern möchten. Klicken Sie auf die Menüleiste und dann auf **Einstellungen** (Sie können auch direkt die F10 Taste auf Ihrer Tastatur drücken).

## Bild

Hier können sie die Bild-Darstellung des Rastersets in **Meine Raster** ändern

## Zusammenfassung

Die Zusammenfassung enthält eine kurze Beschreibung des Rastersets.

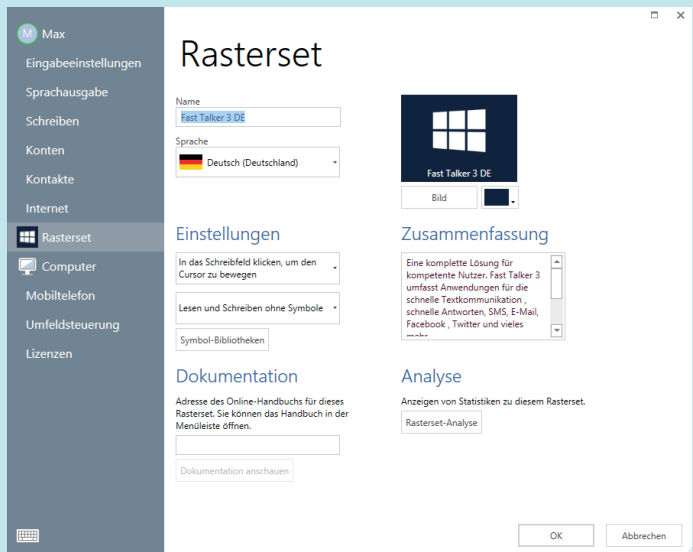

## Einstellungen

Wählen Sie aus, was geschehen soll, wenn der Schreibbereich ausgewählt ist (entweder den Text Sprechen oder den Cursor bewegen).

## Dokumentation

Wenn es ein Online-Handbuch für das Rasterset gibt, können Sie hier eine URL einstellen und online abrufen.

# Einstellungen

## Rasterset Analyse


Die Analyse gibt Ihnen detaillierte Informationen über das Rasterset.

### Zusammenfassung

Allgemeine Informationen wie Name und Anzahl der Raster oder die Sprache. Hier erhalten Sie auch Informationen über Raster, die nicht mit anderen verknüpft sind.

### Rastergrößen

Überprüfen Sie, ob die Rastergrößen einheitlich sind. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Fingerführung eingesetzt wird.

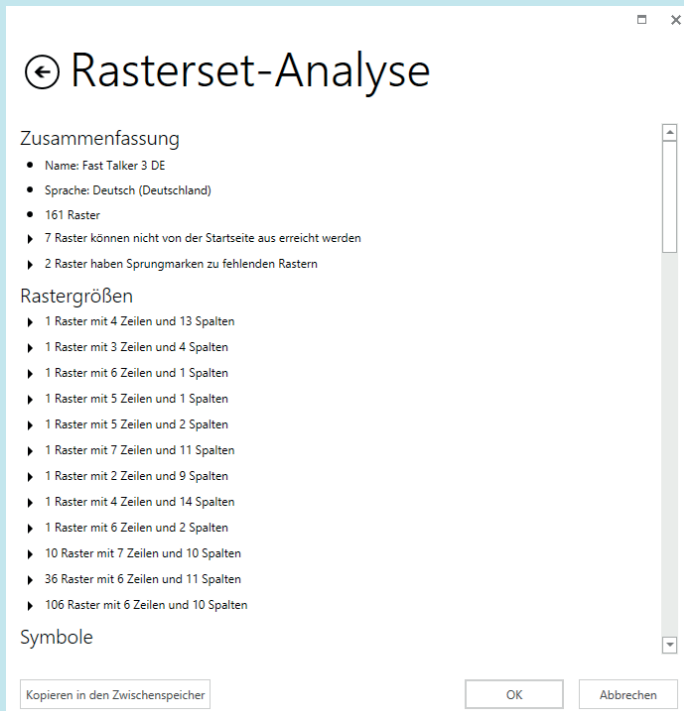

### Symbole

Hier erhalten Sie Informationen darüber, welche Symbolsammlungen genutzt werden, z.B. um festzustellen, ob die Symbole alle aus einer Symbolbibliothek stammen.