



Control Prog

Gebrauchsanweisung

Art. nr: 425700

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Zweckbestimmung	2
Über dieses Dokument	2
Übersicht über Control Prog	3
Zeichenerklärung	4
Erste Schritte mit Control Prog	5
Einsetzen der Batterien	5
Die Befestigung des Control Prog	5
Verwenden Control Prog	6
Die Wahl der Ebene	6
Öffnen/ Schließen einer Ebene	7
Das Erlernen der Kanäle von einem anderen Sender	7
Sichern/Entsichern (Löschschutz) einer Ebene	8
Wiederherstellen der Grundeinstellung	8
Datenkommunikation	10
Transportsperre	10
Personalisieren Control Prog	11
Beschriftung/Notizen	11
Erstellen des 4096-Codes	11
Codes kopieren	12
Ein-/Ausschalten des Signals der akustischen Ebenenanzeige	13
Einstellung der Anschlagsverzögerung	13
Erstellen von automatischen Sequenzen (Makro)	14
Erstellung einer manuellen Sequenz	14
Direktwahl einer Ebene	15
Die automatische Rückstellung zur Grundebene	16
Steuerung mit Scanner	17
Schnellwahl der Ebene und Alarm	18
Direktsteuerung erstellen	26
Remote Scan erstellen	28
Maussteuerung erstellen	29
Übrige Computersteuerung	31
Anschluß an den Relaisausgang	32
Kurzfassungen gesammelt	33
Ebene öffnen/schließen	33
Wartung	36
Lagerung und Entsorgung	36
Lagerung	36
Entsorgung	36
Produktspezifikationen	37
Wichtige Informationen	38
Sicherheitsdefinitionen	38
Sicherheitshinweise vor Verwendung von Control Prog	38
Schwere Vorfälle	38
Konformität mit den Anforderungen für Medizinprodukte	38
Produkthaftung	38
Kontaktinformation	39


Einleitung

Der Control Prog ist ein programmierbarer IR-Sender, der gewöhnliche IR-Fernsteuerungen für TV, Video, Stereo usw. ersetzen kann. Der Control Prog besitzt insgesamt 241 verschiedene Programmierplätze und kann entweder über die Tasten, oder auch mit externen Ein- oder Mehrfunktionskontakten (auch Joystick) bedient werden. Wenn externe Bedienkontakte benutzt werden, können verschiedene Scannmethoden gewählt werden. Verschiedene Funktionen des Control Progs können auch durch einen Computer gesteuert werden, aber auch kann ein Computer mit Control Prog gesteuert werden.

Zweckbestimmung

Control Prog ist eine einfach zu bedienende Fernbedienung zur Unterstützung von Personen, die aufgrund motorischer, kognitiver oder visueller Beeinträchtigungen keine Standardfernbedienung verwenden können. Das Gerät kann dem Anwender helfen, zuhause elektronische Geräte zu steuern, beispielsweise Fernsehgeräte, Beleuchtung oder Eingangstür- und Garagentoröffner. Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich bestimmt.

Über dieses Dokument

 Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die wichtigen Informationen auf Seite 38.

In diesem Benutzerhandbuch wird beschrieben, wie Sie das Produkt einrichten und verwenden. Die Handbücher richten sich an Techniker und Support-Mitarbeiter, die das Produkt konfigurieren und die Benutzer in die Verwendung einweisen.

Übersicht über Control Prog

Das Bild zeigt die verschiedenen Bezeichnungen, die im Text verwendet werden.

Fig 1



1. Indikatorlampen, die die verschiedenen Ebenen anzeigen:

- Ebene 1-5 Rot
- Ebene 6-10 Grün
- Ebene 11-15 Orange

2. Indikatorlampe im Programmiermodus

3. Ebenetaste

4. Funktionstasten:

0-9, !, *, #, A, B, C, D

5. Code-Taste

6. Eingang für Joystick

7. Programmierknopf **P** (Reset)

8. Computereingang


9. Eingänge für 1- Funktionsschalter, sowie Ausgänge mit Relaisfunktion

10. Gummiabdeckung

Bevor Sie den Control Prog benutzen, beachten Sie einige wichtige Hinweise:
















- Um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie den Programmierknopf mit z.B. einem Kugelschreiber und **gleichzeitig** eine Funktionstaste, je nachdem was programmiert werden soll.
- Bei Fehlbetätigungen während des Programmierens, sind diese durch erneutes Drücken des Programmierknopfes (Reset den Sie an der Seite finden), rückgängig zu machen.
- Es ist wichtig, nicht zu lange zwischen den verschiedenen Programmierschritten zu warten. Nach einer gewissen Zeit verläßt der Control Prog automatisch den Programmiermodus, um Strom zu sparen.
- Wenn eine Taste auf der Tastatur oder ein externer Scannfunktionsschalter länger als 20 Sekunden aktiviert wurde, wird der Control Prog die Sendung des IR- Signals abbrechen um die Batterien zu sparen.

Bei Lieferung ist der Control Prog mit folgenden Grundeinstellungen belegt:

- Die Anschlagsverzögerung mit dem Wert 0.
- Das akustische Signal mit dem Wert 4.
- Nur Ebene 2 ist geöffnet, die anderen geschlossen.
- Das Scannen beginnt von der obersten Zeile.
- Die Scanngeschwindigkeit beträgt 1,5 Sekunden.
- Das Blinksignal beim Scannen ist aktiviert.
- Die Scannart ist die Alternative 6 (automatisches, lineares Scannen, 1-Funktionsschalter).
- Die maximale Anzahl der Scannzyklen ist auf 2 eingestellt.
- Die Gewa Link Kanäle 00-127 befinden sich auf den Ebenen 1-8.
- Die Steuerfunktionen des Computers liegen auf der Ebene 10.
- Ein Zufallscode auf -Taste.
- Die Ebenenanzeige ist ausgeschaltet.

Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden im Text verwandt:

	= Programmierknopf
 und 	= Beliebige Taste am Control Prog
	= Beliebige Taste am Sender, die übertragen werden soll
 ...   	= Tasten 0-9, *#
   	= Tasten A, B, C, D
	= Codetaste
	= Ebenentaste
	= Ebenentaste, die ca. 2 Sek. gedrückt und gehalten wird


Erste Schritte mit Control Prog

Einsetzen der Batterien

Lösen Sie die Schraube der Batterieklappe auf der Rückseite des Control Progs mit einem Schraubendreher und setzen Sie 4 Alkaline Batterien vom Typ LR03 1,5 V (Micro) ein. Beachten Sie die Polarität entsprechend der Beschriftung im Batteriefach. Es ist wichtig, daß **Alkaline** Batterien benutzt werden, da diese gegen Auslaufen von Batteriesäure geschützt sind und eine längere Betriebsdauer haben. Beenden Sie die Montage der neuen Batterien, indem Sie auf **P** drücken.

i *HINWEIS: Zum Batteriewechsel: Drücken Sie keine Taste. Der Sender kann aufgezeichnete Kanäle verlieren.*

Batteriewarnung

Der Control Prog ist mit einer Batteriewarnung ausgestattet, die angibt, wenn die Batterien ihre untere Grenze erreichen. Ein akustisches Signal  ertönt mit kurzen Tönen im Interwall von 30 Sekunden. Nach einer Weile verändert sich der Interwall in Abständen von 10 Minuten. Die Batterien sollten dann so schnell wie möglich erneuert werden.

Die Befestigung des Control Prog

⚠ *WARNUNG: Der Gleitverschluß der Kordel ist ein Sicherheitsdetail, das ein Erdrosseln verhindert wenn sich der Sender irgendwo verfangen sollte. Kontrollieren Sie, daß die Enden der Kordel leicht herausgezogen werden können. Knoten Sie niemals die Halskordel.*

Unter dem Control Prog sind Gummifüße, damit der Sender nicht rutscht. In vielen Fällen ist das aber nicht ausreichend, sondern der Sender muss festmontiert werden. Als Zubehör gibt es einen Halter (Art.Nr.8105), in den der Control Prog einrastet. Dieser Halter kann dann zusammen mit einer Klemme am Bett, Tisch oder Rohren festmontiert werden. Ferner ist die Befestigung an einem beweglichen Stativ (Infusionsständer) möglich oder er kann mit der Halskordel um den Hals getragen werden.




Fig 2

Verwenden Control Prog

Die Wahl der Ebene



Der Control Prog hat insgesamt 15 Ebenen mit je 16 programmierbaren Tasten. Diese sind bei Lieferung auf einer Grundeinstellung mit GewaLink Kanälen 00-127, Ebene 1-8 (siehe Tabelle 1) eingestellt. Die Wahl ist frei, ob man eine, mehrere oder alle 15 Ebenen benutzen will. Fünf Lampen zeigen an, auf welcher Ebene man sich befindet (siehe Fig. 1). Ebenen 1-5 werden mit rotem Licht, 6-10 mit grünem Licht und Ebene 11-15 mit orangem Licht angezeigt. Die Erkennung der unterschiedlichen Ebenen wird auch durch verschiedene akustische Signale unterstützt.

Wenn mehrere Ebenen aktiv sind, wechselt man diese, indem man auf die Ebenentaste  drückt. Nach jedem Druck folgt die nächste Ebene. Wird die Taste gedrückt gehalten, laufen die Ebenen automatisch vorwärts am Control Prog. Dieses gilt, wenn der Control Prog in der Grundeinstellung entsprechend Scannalternative 6 eingestellt ist. Das genaue Verhalten der Ebenentaste entspricht der eingestellten Scannmethode, z.B. manuelles oder automatisches Scannen. Siehe Abschnitt: *Einstellung verschiedener Scannalternativen*.

Bei Lieferung ist nur **Ebene 2 geöffnet**, die übrigen sind geschlossen. Um weitere Ebenen zu öffnen, siehe nächsten Abschnitt: *Öffnen/Schließen einer Ebene*.

Wenn nur **eine Ebene** geöffnet ist, hat die Ebenentaste automatisch einen Kanal erhalten, der dem ersten Kanal der folgenden Ebene entspricht. Darum können 18 Funktionen gesteuert werden, auch wenn nur eine Ebene geöffnet ist. Siehe ¹ in der Tabelle 1.




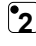

Tabelle 1: Grundeinstellung GewaLink-Kanäle

GewaLink Kanaler											
Taste auf Control Prog	Ebene 1-5 (rote Indikation)					Ebene 6-10 (grüne Indikation)					Ebene 11-15 (orangene Indikation)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-15
1	00	16	32	48	64	80	96	112	62	Tab	62
2	1	17	33	49	65	81	97	113	62	↑	62
3	2	18	34	50	66	82	98	114	62	Pg up	62
4	3	19	35	51	67	83	99	115	62	←	62
5	4	20	36	52	68	84	100	116	62	Enter	62
6	5	21	37	53	69	85	101	117	62	→	62
7	6	22	38	54	70	86	102	118	62	Back Space	62
8	7	23	39	55	71	87	103	119	62	↓	62
9	8	24	40	56	72	88	104	120	62	Pg Down	62
0	9	25	41	57	73	89	105	121	62	Win	62
*	10	26	42	58	74	90	106	122	62	Alt F4	62
#	11	27	43	59	75	91	107	123	62	Alt Tab	62
A	12	28	44	60	76	92	108	124	62	Alt	62
B	13	29	45	61	77	93	109	125	62	Esc	62
C	14	30	46	² 62	78	94	110	126	62	Space	62
D	15	31	47	63	79	95	111	127	62	F5	62
	16	32	48	64	80	96	112	62	62	62	00
	Code										

¹ Wenn nur **eine Ebene** geöffnet ist, hat die Ebenentaste automatisch einen Kanal erhalten, der dem ersten Kanal der folgenden Ebene entspricht.

² Kanal 62 ist ein Stoppcode und kann keine Funktion steuern. Dagegen ist es aber möglich, diese Taste mit einem Kanal/Code zu belegen, der damit eine Funktion steuern kann.

Öffnen/ Schließen einer Ebene

1. Drücken Sie auf **P** und  gleichzeitig. Die Lampen der Ebenentaste und der aktuellen Ebene leuchten jetzt.
2. Mit der Ebenentaste gehen Sie bis zu der Ebene, die geöffnet oder geschlossen werden soll .
3. Drücken Sie nun , um die gewählte Ebene zu öffnen oder , um diese zu schließen. Die Lampe der Ebene wandert automatisch zur nächsten Ebene, die dadurch direkt geöffnet oder geschlossen werden kann.
4. Beenden Sie den Vorgang mit einem langen Druck (ca 2 Sek.) auf  bis die Lampe der Ebenentaste erlischt.

Man kann auch die Ebenen 1-10 gleichzeitig öffnen, indem auf **A** gedrückt wird, oder für die Ebenen 1-15 auf **B**. Die Ebenen 11-15 können nur geöffnet werden indem auf **B** gedrückt wird.

Kurzfassung

Ebene öffnen/schließen: **P** + , Ebene wählen,  oder   →


Öffnen =  Schließen: 

Ebenen 1-10 gleichzeitig öffnen: **P** + , **A**

Ebenen 1-15 gleichzeitig öffnen: **P** + , **B**

Grundeinstellung = Ebene 2 geöffnet.

Das Erlernen der Kanäle von einem anderen Sender

1. Überzeugen Sie sich, daß die Batterien der beiden Sender die volle Kapazität haben. Bei dem Einlernen bitte **nicht** die Sender in starkes Licht (z.B. Sonnenlicht) legen.
2. Legen Sie die beiden Sender auf einen Tisch, wobei der Originalsender auf die hintere Seite des Control Progs gerichtet wird. (Fig 3).
3. Wählen Sie die Ebene, die programmiert werden soll. Es kann jeweils nur eine Ebene z.Z. programmiert werden.
4. Drücken Sie gleichzeitig auf **P** und . Die Lampen an der Taste 1 und an der aktuellen Ebene blinken jetzt.
Um zu sehen, ob die Sender richtig ausgerichtet sind, halten Sie eine wahlfreie Taste des Originalsenders gedrückt. Die Lampe der Ebenentaste blinkt nun grün. Bewegen Sie dabei den Originalsender nach links und rechts, bis die Lampe jeweils erlischt. Bewegen Sie danach den Originalsender rückwärts, bis die Lampe erlischt. (Bei manchen Sendern bis zu einem Meter). Legen Sie danach den Originalsender in die Mitte der herausgefundenen Begrenzungen. Einige Sender blinken nur kurz bei jedem Tastendruck. Drücken Sie in diesem Fall mehrmals.
5. Drücken Sie kurz die Taste am Control Prog, die mit einem neuen Kanal belegt werden soll. Die Lampe an der Ebenentaste leuchtet nun mit stetigem orangenem Schein.
6. Halten Sie nun die Taste des Originalsenders, die zum Control Prog übertragen werden soll. Lassen Sie sie wieder los, wenn die Lampe der Ebenentaste grün leuchtet. Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern. Wenn die Lampe wieder orange leuchtet, drücken Sie noch einmal oder mehrmals, bis sie grün blinkt und erlischt. Wenn die Lampe rot blinkt, ist das Einlernen mißlungen. Versuchen Sie es noch einmal ab Punkt 4.

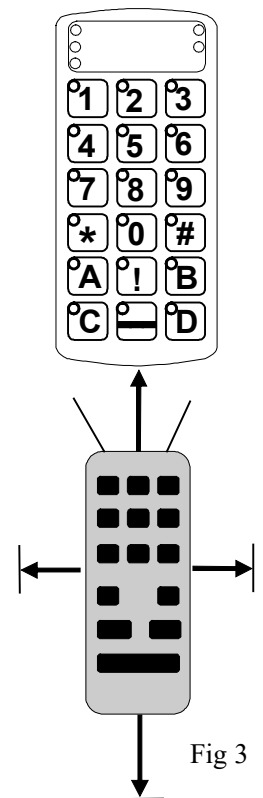



Fig 3


Wenn Sie ein akustisches Signal vernehmen ♪♪♪♪, ist die Ebene für das Einlernen verriegelt. Bitte lesen Sie im nächsten Abschnitt, wie eine Ebene entriegelt wird.

7. Wenn das Einlernen auf der ersten Taste gelungen ist, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis alle Tasten belegt sind. Beenden Sie das Einlernen, indem Sie auf  drücken. Die Lampe der Ebenentaste blinkt dann grün, um anzuzeigen, daß der Vorgang beendet ist.
8. Testen Sie nun die programmierten Funktionen an dem Gerät, das gesteuert werden soll.

 **HINWEIS:** Lesen Sie zuerst den nächsten Abschnitt, wenn Sie auf Ebene 9 und 10 einlernen wollen!

Kurzfassung




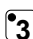


Einlernen:  + , , , .

 **TIPP:** Der Control Prog kann die Codes der meisten, auf dem Markt vorkommenden IR- Sender lernen, aber es gibt vereinzelte Ausnahmen. Es kann vorkommen, daß einzelne Funktionen oder alle Funktionen eines Senders nicht eingelesen werden. In diesem Fall kann eine andere Lernmethode probiert werden. Unter Punkt 4 verfahren Sie wie folgt:

Sichern/Entsichern (Löschschutz) einer Ebene

Um Codes gegen unabsichtliches Löschen zu schützen, wenn neue Codes eingelernt werden, ist es möglich, jede Ebene für sich zu sichern. Gesicherte Ebenen werden beim Einlernen mit einem akustischen Signal ♪♪♪♪ angezeigt.


Machen Sie folgendes, um die Ebenen zu sichern oder zu entsichern:

1. Drücken Sie auf  und  **gleichzeitig**. Die Lampe der Ebenentaste und der aktuellen Ebene leuchten.
2. Durch mehrmaliges Drücken der Ebenentaste  gehen Sie bis zu der Ebene, die gesichert oder entsichert werden soll.
3. Drücken Sie nun auf  zum Sichern oder  zum Entsichern. Die Lampe der Ebenen wandert automatisch zur nächsten Ebene, die dadurch direkt gesichert oder entsichert werden kann.
4. Beenden Sie den Vorgang mit einem langen Druck (ca. 2 Sek.) auf |, bis die Lampe der Ebenentaste grün blinkt und dann erlischt.

Kurzfassung

Sichern/Entsichern (Löschschutz) einer Ebene:

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
 + , Ebene wählen,  oder , |


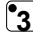

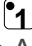
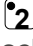
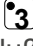


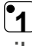
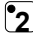
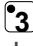

Ebene sichern = , Ebene entsichern = 

Wiederherstellen der Grundeinstellung

Mit dem Control Prog hat man die Möglichkeit, eine oder alle Tasten einer Ebene oder alle Tasten auf den Ebenen 1-15 gleichzeitig wiederherzustellen. Die Tasten gehen wieder in die Grundeinstellung der GewaLink Kanäle 00-127 zurück. Die Tabelle 2 zeigt, was beim Wiederherstellen geschieht. Lesen Sie auch den Abschnitt *Sichern/Entsichern einer Ebene*.

Tabelle 2: Wiederherstellen der Grundeinstellung

Wiederherstellung einer Taste	Die Ebene, auf der sich die Taste befindet, muß entsichert sein, bevor eine Wiederherstellung erfolgen kann.
Wiederherstellung einer Ebene	Die Ebene muß entsichert sein, bevor sie wiederhergestellt werden kann.
Wiederherstellung aller Ebenen	Die Ebenen 1-15 werden wiederhergestellt und gehen in die Grundeinstellung zurück, auch wenn sie gesichert sind. Die übrigen Einstellungen gehen auch in die Grundeinstellung zurück und ein neuer Zufallscode wird auf die  -Taste gelegt.








1. Beginnen Sie mit dem Entsichern der Ebene, die wiederhergestellt werden soll. Dies ist nicht erforderlich, wenn alle Ebenen gleichzeitig wiederhergestellt werden sollen.
2. Wählen Sie die Ebene, auf der die Wiederherstellung durchgeführt werden soll. Dies ist nicht erforderlich, wenn alle Ebenen gleichzeitig wiederhergestellt werden sollen.
3. Drücken Sie auf  und  gleichzeitig. Die Lampen der Taste 3 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
- 4.a Wiederherstellung einer Taste.
Drücken Sie auf die Taste, die wiederhergestellt werden soll. Die Lampe blinkt grün, um anzuzeigen, daß es gelungen ist.
- 4.b Wiederherstellung aller Tasten auf einer Ebene.
Drücken Sie der Reihe nach auf die Tasten , , ,  und beenden Sie mit . Alle Tasten blinken nun der Reihe nach rot und zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es erfolgreich ausgeführt wurde.
- 4.c Wiederherstellung aller Tasten auf allen Ebenen.
Drücken Sie der Reihe nach auf die Tasten , , ,  und beenden Sie mit . Alle Tasten auf den Ebenen 1-15 blinken nun der Reihe nach rot und zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung


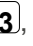
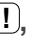
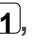
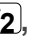


Wiederherstellung einer Taste:

Ebene wählen,  + , wähle Taste.

Wiederherstellung einer Ebene:

Ebene wählen,  + , , , , , 

Wiederherstellung aller Ebenen zur Grundeinstellung:

 + , , , , , 

Datenkommunikation

Datenübertragung zwischen zwei Control Prog Sendern

Für den Control Prog besteht die Möglichkeit, alle programmierten Kanäle und Einstellungen von einem Control Prog zum anderen einfach zu übertragen. Dies kann man zum Beispiel machen, bevor man seinen Sender zum Service oder Austausch schickt. Zur erfolgreichen Übertragung sind einige Voraussetzungen erforderlich:

Wenn die Sender die gleichen Programmversionen haben, kann eine Übertragung ohne weiteres durchgeführt werden. Die Programmversion ist auf der Rückseite des Control Progs vermerkt (z.B. Ver:1.0).

Verfahren Sie folgendermaßen bei einer Übertragung:

1. Überzeugen Sie sich, daß die Batterien der beiden Sender die volle Kapazität haben.
2. Schließen Sie das Computerkabel (Art.Nr.425622) zwischen den beiden Datenausgängen der Sender an (Fig. 6).
3. Drücken Sie gleichzeitig auf **P** und **D** auf dem Sender, der Daten **entgegennehmen** soll. Nach ca.15 Sekunden ist die Überführung abgeschlossen.

Kurzfassung

Übertragung von Daten zwischen zwei Sendern: **P** + **D**

Datenübertragung zwischen Control Prog und Computer

Der Control Prog ist vorbereitet, um mit einem PC kommunizieren zu können. Zum Erstellen einer Scherungsdatei können Sie das Programm **Gewa Control Tool** verwenden, das Sie auf der beiliegenden CD finden. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer und schließen Sie das Computerkabel (Artnr: 425618) an den Control Prog an (Fig 8) und das andere Ende an den Computerausgang (COM-port). Zum Anschluß an den USB-Ausgang ist ein Adapter erhältlich (425620 Adapter USB/seriell). Öffnen Sie nun das Programm und nehmen die gewünschten Einstellungen am Control Prog vor. Das Computerkabel bestellen Sie bei den Repräsentanten der Firma GEWA. Mehr Informationen finden Sie auf der Internet Homepage <http://www.gewa.se>.

Transportsperre

Beim Transport können die Tastatur und alle angeschlossenen Funktionskontakte gesperrt werden. Dies verhindert, daß Control Prog unfreiwillig startet und dadurch unnötig Batterien verbraucht.

Verfahren Sie folgendermaßen zum Sperren/Aufsperrern:

Drücken Sie **P** und **0** gleichzeitig zum Sperren. Die Lampe der Ebenentaste blink grün.

Zum Aufsperrern drücken Sie nur **P**.

Kurzfassung

Transportsperre ein: **P** + **0**

Transportsperre aus: **P**

Personalisieren Control Prog

Beschriftung/Notizen

Die Tastatur ist bei Auslieferung mit Ziffern beschriftet. Die Beschriftung kann aber ausgetauscht und mit eigenen Gestaltungen ersetzt werden. Auf der beiliegenden CD befindet sich ein Dokument, daß Sie im Microsoft Word öffnen können. Darin finden Sie Vorlagen und Bilder womit Sie eigene Auflagen gestalten können. Diese können Sie dann auf eine Overhead-Folie oder weißem Papier ausdrucken. Danach stecken Sie die Auflage in den Einstich unter der Tastatur. Vorher müssen Sie aber das Tastaturreaster abnehmen. Dieses ist in den Ecken mit vier Plastikbeinen aufgesteckt. Sie können das Raster mit einem Messer, das zwischen das Raster und dem Gehäuse eingeführt wird, abheben. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und heben Sie jede Ecke ein wenig nach der anderen, sonst können die Beine abbrechen.



Fig 4

Zum Lieferumfang des Control Progs gehören auch 2 Stück A4-Bögen für Aufzeichnungen.

Erstellen des 4096-Codes

Der Control Prog wird mit einem speziellen Codekanal (4096), der zufallsgesteuert ist, auf der -Taste ausgeliefert. Dieser Codekanal wird normalerweise für Funktionen benutzt, die zuverlässige Sicherheit erforderlich machen, wie zum Beispiel eine Wohnungs- oder Hauseingangstür. Der Code hat 4096 verschiedene Kombinationen.

Die -Taste besitzt immer den gleichen Code, egal auf welcher Ebene Sie sich befinden. Wenn ein neuer Codekanal erforderlich wird, so gibt es drei Möglichkeiten, diesen zu erstellen.

Die erste Methode, indem man von einem Codesender einliest, siehe Abschnitt: *Das Erlernen der Kanäle von einem anderen Sender*. Mit dieser Methode kann man einen Codekanal auf jede beliebige Taste legen.

Die zweite Methode, indem man mit der Tastatur eine Ziffer zwischen 0 und 4095 eingibt. Der Code legt sich selbst auf die -Taste. Von dieser Taste aus ist es dann möglich, den Code auf andere Tasten zu verlegen. (Siehe Abschnitt: *Code kopieren*). Danach kann man nach Wahl weitere neue Codekanäle erstellen. Die Methode wird folgendermaßen durchgeführt:

1. Drücken Sie auf und gleichzeitig. Die Lampen der -Taste und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie eine Zahl von 0 bis 4095 ein.
3. Beenden Sie mit . Zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde. Schreiben Sie sich den gewählten Code als Gedächtnisstütze auf.

Kurzfassung

Code 4096 einstellen: + , ... ,

Grundeinstellung = Zufallscod.

Die dritte Methode besteht darin, daß ein binärer Code eingegeben werden kann. Der binäre Code wird immer auf die -Taste fallen. Diesen Code kann man entweder selber

erstellen oder man kann ihn von einem IR- Sender oder Empfänger übernehmen. Die IR-Empfänger gibt es in zwei Ausführungen. Eine ältere, wo die Code- Einstellung mit einem 12- poligem DIP Funktionsschalter ausgeführt wird oder eine neuere, die programmierbar ist. Das Prinzip wie der binäre Code erstellt wird ist das gleiche.

In Fig 5 ist ein 12- poliger DIP Funktionsschalter abgebildet. Die DIP Funktionsschalter 1, 4, 6 und 12 sind in ON-Position, die übrigen in OFF-Position.

Als Beispiel wie der binäre Code geschaffen wird, siehe Fig 5:

1. Drücken Sie **P** und **!** gleichzeitig. Die Lampen der **!**- Taste und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Sie geben den Code ein durch Drücken auf die **!** oder **...**. **!** = Funktionsschalter in "On"- Position, **...** = Funktionsschalter in "OFF"- Position. Drücken Sie nun **zwölf** mal der Reihe nach abwechselnd beliebig auf **!** **...** **!** **...** **!** **...** **!** **...** **!** **...** **!** **...**. Wenn zwölfmal gedrückt wurde, blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um das Ende anzuzeigen. Jetzt ist der Code auf Taste **!** eingegeben. Schreiben Sie sich den Code für den zukünftigen Gebrauch auf.

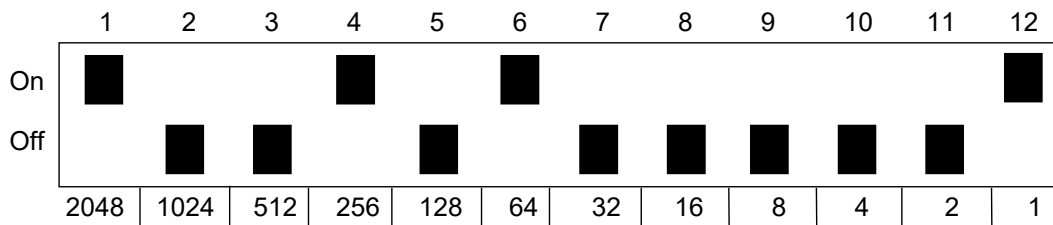


Fig 5

Kurzfassung

Code 4096 binär erstellen: **P** + **!**, ...**!**, oder **...**

On- Position = **!** Off- Position = **...**

Grundeinstellung = Zufallscode.

Codes kopieren

Me Mit dem Control Prog hat man die Möglichkeit, eingelernte Codes und Grundkanäle auf andere Plätze (Tasten) zu kopieren.

i HINWEIS: Der Code/Kanal verbleibt auf dem Ursprungsplatz!


1. Wählen Sie die Ebene und drücken danach auf die Taste, die kopiert werden soll.
2. Wählen Sie die Ebene, auf der Sie den Code kopieren wollen.
3. Drücken Sie nun auf **P** und **8** gleichzeitig. Die Lampen der Taste 8 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
4. Drücken Sie auf die Taste, auf die der Code gelagert werden soll. Zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Code/Kanal kopieren von Taste **X** zur Taste **Y**:





Ebene wählen, wähle **X**, Ebene wählen, **P** + **8**, wähle **Y**

Ein-/Ausschalten des Signals der akustischen Ebenenanzeige

Um hören zu können, auf welcher Ebene man sich befindet, besteht die Möglichkeit, eine akustische Ebenenanzeige einzuschalten. Wird die  Taste gedrückt, kann man hören, auf welcher Ebene man sich befindet. Dies gilt auch für den Scanner in der ersten Auswahl.

Ebene 1-5 wird mit einem hellen Ton und 1-5 kurzen Signaltönen angezeigt, die Ebene 6-10 mit einem dunkleren Ton angezeigt und die Ebenen 11-15 mit einem noch dunkleren Ton und 1-5 kurzen Signaltönen angezeigt.

Verfahren Sie folgendermaßen beim Ein-/Ausschalten der akustischen Ebenenanzeige:

1. Drücken Sie gleichzeitig  und . Die Lampen der Taste 4 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie  zum Ein- oder  zum Ausschalten. Zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es erfolgreich ausgeführt wurde.

Kurzfassung



Einschalten der akustischen Ebenenanzeige:  + , 

Ausschalten der akustischen Ebenenanzeige:  + , 

Grundeinstellung = ausgeschaltet.

Einstellung der Anschlagsverzögerung

Mit dem Control Prog hat man die Möglichkeit, eine Anschlagsverzögerung einzustellen. Die Zeit also, wenn eine Taste oder externer Funktionsschalter gedrückt wird, bis eine Ausführung erfolgt. Die Anschlagverzögerung kann zwischen 0 und 9 eingestellt werden, wobei 0 keine und 9 maximale Verzögerung (ca. 0,9 Sek.) bedeutet.

1. Drücken Sie auf  und  gleichzeitig. Die Lampen an der Taste 2 und der aktuelle Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf eine beliebige Taste zwischen 0 und 9 um die Zeit der Anschlagsverzögerung zu wählen. Zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Anschlagsverzögerung einstellen:  + , ... 

Grundeinstellung = 0.

Erstellen von automatischen Sequenzen (Makro)

Der Control Prog hat die Möglichkeit Sequenzen zu senden. Durch Druck auf **eine Taste** kann der Control Prog automatisch eine Serie von Tastendrücken ausführen. Zum Beispiel:

Um auf eine Tafel im Videotext - TV zu gelangen, muß man 4 Tastendrücke ausführen. Diese 4 Tastendrücke können eingelernt werden, so daß nur ein Druck auf den Control Prog genügt. Andere Anwendungen können sein, daß Sie lange Telefonnummern mit nur einem Druck wählen können oder wenn man das Telefon bedient, kann gleichzeitig der Ton des Fernsehers abgeschaltet werden. Der Control Prog kann auch lernen, die Ebene zu wechseln und sich erinnern, wie **lange** eine Taste senden soll (Maximal 25,5 Sekunden). Andere schon erlernte Sequenzen können auch einen Teil einer neuen Sequenz ausmachen.

Sie können jederzeit die Sendung einer Sequenz unterbrechen, indem Sie auf eine beliebige Taste drücken.

Wenn eine Sequenz eingelernt wird, sendet Control Prog gleichzeitig den Inhalt der Taste. Maximal 47 Tastendrücke je Sequenz können eingelernt werden.

i HINWEIS: Die Taste, auf der die Sequenz liegen soll, darf nicht einen Teil der Sequenz darstellen.

1. Drücken Sie auf **P** und **A** gleichzeitig.
2. Drücken Sie auf die Tasten, die in die Sequenz einbezogen werden sollen.
3. Wählen Sie die Ebene, auf der die Sequenz liegen soll.
4. Drücken Sie auf **P** und **B** gleichzeitig. Die Lampen der Taste B und der aktuellen Ebene leuchten nu.
5. Wählen Sie die Taste, die die Sequenz senden soll. Zum Abschluß blinkt die Lampe der Ebenentaste grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Automatische Sequenz einlernen: **P** + **A**, Sequenz drücken, Ebene wählen, **P** + **B**, wähle Speicherplatz.

Erstellung einer manuellen Sequenz

Die manuelle Sequenz ist eine Variante der automatischen Sequenz. Anstatt die ganze Sequenz vom Control Prog in Reihenfolge zu senden, drückt man manuell jeden Schritt in der Sequenz. Ist die Sequenz am Ende angelangt, beginnt sie wieder von vorn. Auch wenn zwischendurch andere Tasten gedrückt werden, erinnert sich der Control Prog an den letzten Schritt in der Sequenz. Eine Anwendung kann sein, daß man den TV mit nur einer Taste ein und ausschalten kann. Eine zweite Möglichkeit, einen einfachen Scannmodus zu erstellen, um sich durch die verschiedenen TV- Stationen zu bewegen. Eine Sequenz kann aus einer Serie von Tastendrücken von verschiedenen Ebenen bestehen, auch wie **lange** eine Taste senden soll (max. 25,5 Sek.).

Wenn eine Sequenz geschaffen wird, sendet Control Prog gleichzeitig den Inhalt der Taste.

Maximal 47 Tastendrücke je Sequenz können erlernt werden.

i HINWEIS: Die Taste, auf dem die Sequenz gespeichert werden soll, darf nicht ein Bestandteil der Sequenz sein.

So gestalten Sie eine manuelle Sequenz:

1. Drücken Sie auf **P** und **A** gleichzeitig.
2. Drücken Sie auf die Tasten, die in die Sequenzen einbezogen werden sollen, auch Tausch der Ebene ist möglich.
3. Wählen Sie die Ebene, auf der die Sequenz gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie **P** und **C** gleichzeitig. Die Lampen der Taste C und der aktuellen Ebene leuchten jetzt.
5. Drücken Sie **B**.
6. Wählen Sie die Taste, auf der die Sequenz gespeichert werden soll. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Erstellung einer manuellen Sequenz: **P** + **A**, Sequenz eingeben, Ebene wählen, **P** + **C**, **B**, Speicherplatz wählen.

Direktwahl einer Ebene

Beim Control Prog besteht die Möglichkeit, Direktwahltasten herzustellen. Das bedeutet, daß Sie sofort eine Ebene erreichen, indem Sie die gewählte Taste drücken. Zum Beispiel, wenn Sie sich auf der ersten Ebene befinden und auf die Taste 2 drücken, so gelangen Sie direkt auf Ebene 2 oder wenn Sie die Taste 3 drücken, direkt auf die dritte Ebene usw. Wenn Sie sich dann auf der Ebene 2, 3 oder 4 befinden, können Sie auf eine neue Direktwahltaste drücken, um so wieder auf die erste Ebene zu gelangen. Vorher müssen Sie aber die Direktwahltasten der entsprechenden Ebenen geschaffen haben. Siehe Fig 6.



Fig 6

Wie Direktwahltasten geschaffen werden:

1. Wählen Sie, welche Ebene mit der Direktwahltaste erreicht werden soll.
2. Drücken Sie **gleichzeitig** auf **P** und **A**.
3. Wählen Sie die Ebene, worauf die Direktwahltaste gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie **gleichzeitig** auf **P** und **B**. Die Lampen der Taste B und der aktuellen Ebene leuchten nun.
5. Wählen und drücken Sie die Taste, die die Direktwahltaste werden soll. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um anzuzeigen, daß es vollzogen ist.

Kurzfassung

Direktwahltaste erstellen:

Wählen Sie die Ebene, die mit der Direktwahltaste erreicht werden soll, **P + A**, danach wählen Sie die Ebene, worauf die Direktwahltaste gespeichert werden soll, **P + B**, abschließend drücken Sie die gewünschten Direktwahltaste.

Die automatische Rückstellung zur Grundebene

Es besteht die Möglichkeit, daß der Control Prog immer zu einer speziellen Grundebene zurückkehren kann, wenn mehrere Ebenen geöffnet sind. Diese Grundebene kann z.B. Funktionen zur Steuerung des Telefons oder andere Funktionen sein, die man häufiger benutzt und schnell erreichen will. Nach ca. 5 Minuten kehrt der Control Prog zur Grundebene zurück.

Verfahren Sie wie folgt zur Erstellung der automatischen Rückstellung:

1. Drücken Sie **P** und **↔** gleichzeitig. Jetzt leuchtet die Lampen der Ebenentaste und der aktuelle Ebene.
2. Wählen Sie die Ebene, zu der der Control Prog zurückkehren soll.
3. Für automatische Rückstellung drücken Sie **5** und zum Ausschalten der Funktion drücken Sie **6**. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um anzuzeigen, daß es vollzogen ist.

Kurzfassung

Einschalten/Ausschalten der automatischen Rückstellung: **P + ↔, 5** oder **6**

Einschalten = **5**, Ausschalten = **6**

Grundeinstellung = ausgeschaltet.

Steuerung mit Scanner

Am Control Prog können Sie externe Funktionsschalter anschließen, die einen Scanner starten und damit die Möglichkeit schaffen, 241 verschiedene Funktionen in Ihrer Umgebung zu steuern mit z.B. einem Saug/Blas- Schalter. Man kann verschiedene Einstellungen vornehmen, die den Scanner beeinflussen: Scannmethoden, Scanngeschwindigkeit, Scannanfang, Anzahl der Scannzyklen, Turboscanner und Scannblink. Man kann sogar eine individuelle Scannmethode erstellen. 1-5 verschiedene Funktionsschalter oder Joystick können, abhängig von der Scannmethode, angeschlossen werden. Der folgende Abschnitt beschreibt dieses.

i HINWEIS: Schließen Sie nur von Abilia gelieferte Funktionsschalter an. Wenn andere Funktionsschalter verwendet werden, der Benutzer ist für die Verwendung des Produkts verantwortlich.

Anschließen der Funktionsschalter

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten Funktionsschalter anzuschließen, abhängig von der benötigten Anzahl. An den Eingängen Sw 1 und Sw 2 kann man einen oder zwei 1-Funktionsschalter anschließen. Am Eingang Multi ist es möglich, Funktionsschalter für alle vier Richtungen einschließlich Enter anzuschließen. Auch besteht die Möglichkeit 8 Richtungen und Enter mittels Joysticks zu steuern.

- 1 Funktionsschalter: Eingänge Sw 1, Sw 2 oder Multi. Alle Eingänge können benutzt werden, wenn nur ein Funktionsschalter angeschlossen werden soll.
- 2 Funktionsschalter: Eingang Sw 1 (→) und Sw 2 (↓).
- 3 Funktionsschalter: Eingang Sw 1 (→), Eingang Sw 2 (↓) und Eingang Multi (Enter). Als Alternative können alle drei Funktionsschalter am Eingang Multi angeschlossen werden.
- 5 Funktionsschalter: Eingang Multi (→, ↓, ←, ↑ und Enter).
- Enter: Die Ausführung geschieht durch Druck auf den Funktionsschalter, der am Eingang Multi (Enter) angeschlossen ist. Die Ausführung kann auch an den Eingängen Sw 1 oder Sw 2 geschehen, abhängig von der gewählten Scannmethode. Siehe Tabelle 4!
- Joystick mit 8 Richtungen + Enter: Eingang Multi.

Tabelle 3: Anschließen der Funktionsschalter

Funktionsanzahl	Richtung mit Joystick	Lötpunkte am 6-pol Mini Din Kontakt
1	→	1, 3
2	↓	1, 4
3	←	1, 2
4	↑	1, 5
5	Enter	1, 6
6	→ + ↓ gives ↘	1, 3, 4
7	← + ↓ gives ↙	1, 2, 4
8	← + ↑ gives ↖	1, 2, 5
9	→ + ↑ gives ↗	1, 3, 5

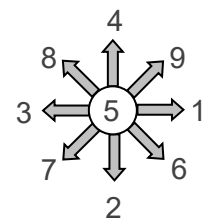
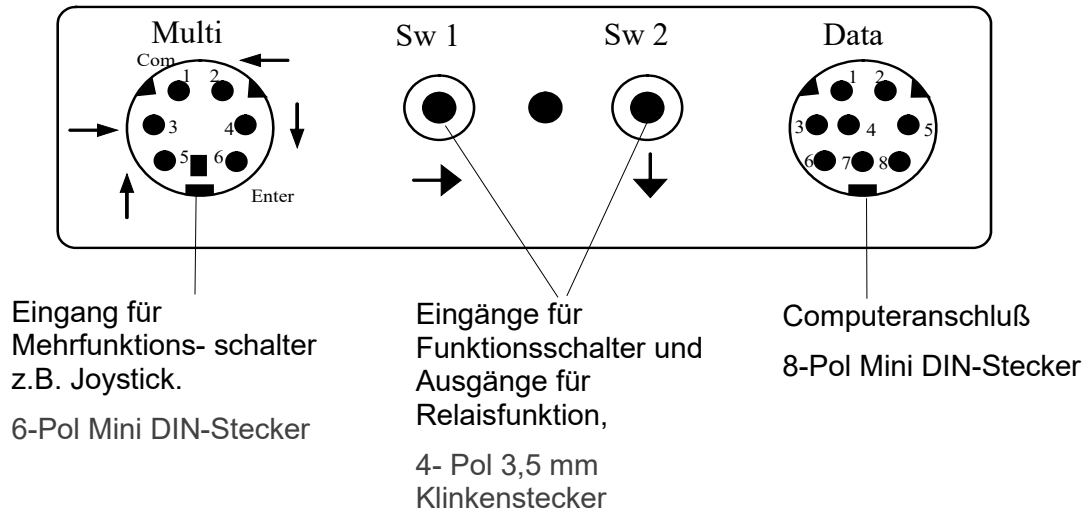


Fig 7

Die Funktionen 1-5 können mit einzelnen Funktionsschaltern benutzt werden.

Fig 8



Schnellwahl der Ebene und Alarm

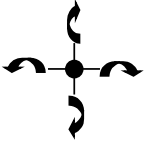
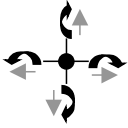
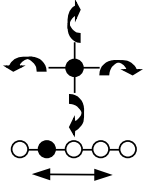
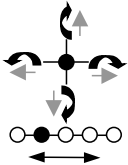
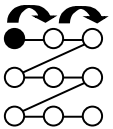
Wenn der Scanner mit externem Funktionsschalter benutzt wird, besteht die Möglichkeit schnell die Ebenen zu wechseln. Hält man den Funktionsschalter beim Scannstart gedrückt, wird Control Prog zwischen den verschiedenen Ebenen scannen. Auf diese Weise kann man schnell eine Ebene wählen. Achtung! Es müssen mindesten zwei Ebenen geöffnet sein. Wird der Funktionsschalter noch länger gehalten, sendet Control Prog den codierten Kanal. Wenn dann ein Alarmsender am Relaisausgang angeschlossen ist, wird dieser aktiviert der dann schnell Hilfe herbeirufen kann. Der Funktionsschalter wird nur gedrückt gehalten, bis der Alarm aktiviert ist. Sehen Sie weiter unter Abschnitt: *Anschluß an den Relaisausgang*.

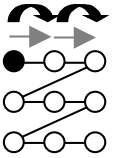
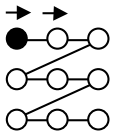
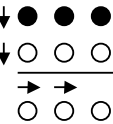
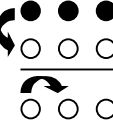
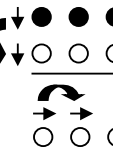
Einstellung der Scannmöglichkeiten

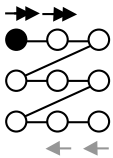
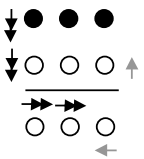
Mit dem Control Prog ist es möglich, zwischen 12 verschiedenen Scannalternativen zu wählen. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Alternativen wird in Tabelle 4 beschrieben. So wählen Sie die Scannmethode:

1. Drücken Sie **P** und **5** gleichzeitig. Die Lampen auf Taste 5 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Wählen Sie die Scannmethode aus der Tabelle 4 und drücken Sie die entsprechende Taste. Zum Abschluß blinkt die Lampe grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Tabelle 4: Scannmethode

Einstellung	Scannmethode ↻ = Manueller Scanner. → = Automatischer Scanner		Funktions-schalter
<p>0</p> <p>Manuelles Scannen in vier Richtungen</p> 	<p>Scannen wird mit einem Druck für jede Bewegung in wahlfreier Richtung ausgeführt. Die Ausführung geschieht mit Enter.</p>	<p>3 bis 5 Funktionen & Joystick</p>	
<p>1</p> <p>Manuelles Scannen in vier Richtungen mit Wiederholung</p> 	<p>Scannen wird mit einem Druck für jede Bewegung in wahlfreier Richtung ausgeführt. Wird der Funktionsschalter gedrückt gehalten, geht der Lichtpunkt automatisch in der gewählten Richtung weiter. Die Ausführung geschieht mit Enter.</p>	<p>3 bis 5 Funktionen & Joystick</p>	
<p>2</p> <p>Manuelles Scannen in vier Richtungen mit Wechseln der Ebene am Anfang und Ende jeder Reihe.</p> 	<p>Scannen wird mit einem Druck für jede Bewegung in wahlfreier Richtung ausgeführt. Wenn das Ende einer Reihe erreicht ist, wechselt der Control Prog automatisch die Ebene. Die Ausführung geschieht mit Enter.</p>	<p>3- bis 5-Funktionen & Joystick</p>	
<p>3</p> <p>Manuelles Scannen in vier Richtungen und Wiederholung mit Wechseln der Ebene am Anfang und Ende jeder Reihe.</p> 	<p>Scannen wird mit einem Druck für jede Bewegung in wahlfreier Richtung ausgeführt. Wird der Funktionsschalter gedrückt gehalten, geht der Control Prog automatisch in die gewählte Richtung. Wenn das Ende einer Reihe erreicht ist, wechselt der Control Prog automatisch die Ebene. Die Ausführung geschieht mit Enter.</p>	<p>3 bis 5 Funktionen & Joystick</p>	
<p>4</p> <p>Manuelles lineares Scannen</p> 	<p>Scannen startet mit einem Druck (Sw 1) für eine Bewegung in aufsteigender Reihe 1, 2, 3.... Die Ausführung geschieht mit Sw 2.</p>	<p>2</p>	

Einstellung	Scannmethode		Funktions- schalter
	↶ = Manueller Scanner. → = Automatischer Scanner		
5	Manuelles lineares Scannen mit Wiederholung 	Scannen startet mit einem Druck (Sw 1) für eine Bewegung in aufsteigender Reihe 1, 2, 3.... Wird der Funktionsschalter gedrückt gehalten, steigert Control Prog automatisch. Die Ausführung geschieht mit Sw 2.	2
6	Automatisches lineares Scannen 	Scannen startet mit einem Druck auf Sw 1 oder Sw 2. Danach steigert Control Prog automatisch in aufsteigender Folge, 1, 2, 3...Die Ausführung geschieht beim zweiten Druck.	1
7	Automatisches Zeilen- und Spaltenscannen 	Scannen startet mit einem Druck auf Sw 1 oder Sw 2. Danach scannt Control Prog in die vertikale Richtung. Beim nächsten Druck scannt Control Prog horizontal. Beim dritten Druck geschieht die Ausführung.	1
8	Manuelles Zeilen- und Spaltenscannen 	Der Scanner wird mit einem Druck auf Sw 2 gestartet mit Bewegung in vertikaler Richtung. Mit Sw 1 wird der horizontale Scanner gesteuert. Die Ausführung geschieht, indem der erste Funktionsschalter wieder gedrückt wird oder ein spezieller Funktionsschalter für die Ausführung verwandt wird. (Enter).	2
9	Automatisches manuelles Zeilen und Spaltenscannen 	Der Scanner wird mit einem Druck auf Sw 2 gestartet mit Bewegung in vertikaler Richtung. Mit Sw 1 wird die horizontale Bewegung gesteuert. Die Bewegung geschieht automatisch, kann aber beschleunigt werden durch Druck auf den Funktionsschalter in gleicher oder entgegengesetzter Richtung zum Scannen. Die Ausführung geschieht, indem der erste Funktionsschalter nochmals gedrückt oder ein spezieller Funktionsschalter dafür verwandt wird. (Enter).	2 bis 5

Einstellung	Scannmethode ↶ = Manueller Scanner. → = Automatischer Scanner		Funktions- schalter
[*]	Automatisches lineares Scannen mit Rücklauf 	Das Scannen wird mit einem Druck auf Sw 1 oder Sw 2 gestartet, danach bewegt sich der Scanner automatisch in aufsteigender Folge, 1, 2, 3... Beim zweiten Druck hält der Scanner an, läuft aber dann langsam wieder zurück. Die Ausführung geschieht beim dritten Druck. Achtung! Control Prog beginnt mit 4- facher Geschwindigkeit, der Rücklauf aber mit der eingestellten Geschwindigkeit.	1
[#]	Automatisches manuelles Zeilen und Spaltenscannen mit Rücklauf 	Das Scannen wird mit einem Druck auf Sw 1 oder Sw 2 gestartet mit Bewegung in vertikaler Richtung. Beim zweiten Druck hält der Scanner an, läuft aber dann langsam wieder zurück. Beim dritten Druck läuft der Scanner in horizontale Richtung. Beim vierten Druck hält der Scanner an, läuft aber dann langsam wieder zurück. Der fünfte Druck aktiviert die Ausführung. Achtung! Control Prog beginnt mit 4- facher Geschwindigkeit, der Rücklauf aber mit der eingestellten Geschwindigkeit.	1

Kurzfassung

Einstellung der Scannmethode: **[P] + [5]**, Scannmethode wählen

Grundeinstellung = Scannmethode 6.

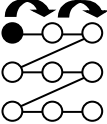
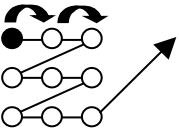
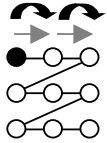
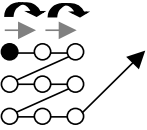
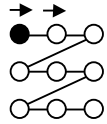
Individuelle Scannsequenz erstellen

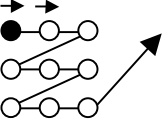
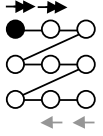
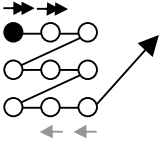
Im Control Prog besteht die Möglichkeit, eine individuelle Scannsequenz zu gestalten, die auf einer beliebigen Taste gespeichert werden kann. Dies bedeutet, daß Sie zu Tasten scannen können, die nur spezifische Funktionen enthalten, wie z.B. TV- Kanäle oder um individuelle Telefonnummern zu wählen. Auch besteht die Möglichkeit in der Scannsequenz zwischen verschiedene Ebenen zu wählen. Wenn Sie eine Scannsequenz erstellen, wählen Sie zuerst eine Scannmethode aus der Tabelle 5, die nur für die individuelle Scannsequenz gültig ist. Andere Scannsequenzen können andere Scannmethoden beinhalten.

Die vorher aus Tabelle 4 ausgewählte Scannmethode wird nicht beeinträchtigt. In einer Sequenz können maximal 96 Schritte gespeichert werden.

[i] HINWEIS: Die Taste, auf der die Sequenz gespeichert werden soll, darf nicht ein Teil der Sequenz sein.

Tabelle 5: Individuelle Scannsequenz erstellen

Einstellung	Scannmethode Nur für individuelle Scannsequenz		Funktions- schalter
<p>0 Manuelles lineares Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Durch Druck auf Sw 1 beginnt der Scanner für jede Steigerung in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Die Ausführung geschieht mit Sw 2 oder Enter.</p>		2 bis 3
<p>1 Manuelles lineares Scannen samt Fortsetzung mit normalem Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Durch Druck auf Sw 1 beginnt der Scanner für jede Steigerung in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Die Ausführung geschieht mit Sw 2 oder Enter. Wird keine Wahl getroffen, setzt das normale Scannen fort.</p>		2 bis 3
<p>2 Manuelles lineares Scannen mit Wiederholung</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Durch Druck auf Sw 1 beginnt der Scanner für jede Steigerung in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Wird der Schalter gedrückt gehalten, scannt Control Prog automatisch. Die Ausführung geschieht mit Sw 2 oder Enter.</p>		2 bis 3
<p>3 Manuelles lineares Scannen mit Wiederholung samt Fortsetzung mit normalem Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Durch Druck auf Sw 1 beginnt der Scanner für jede Steigerung in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Wird der Schalter gedrückt gehalten, scannt Control Prog automatisch. Die Ausführung geschieht mit Sw 2 oder Enter. Wird keine Wahl getroffen, setzt das normale Scannen fort.</p>		2 bis 3
<p>4 Automatisches lineares Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Control Prog steigert in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Die Ausführung geschieht mit Sw 1 oder Sw 2.</p>		1


5	<p>Automatisches lineares Scannen samt Fortsetzung mit normalem Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Control Prog steigert in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Die Ausführung geschieht mit Sw 1 oder Sw 2. Wird keine Wahl getroffen, setzt das normale Scannen fort.</p>	1
6	<p>Automatisches lineares Scannen mit Rücklauf</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Control Prog steigert automatisch in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Beim zweiten Druck hält der Scanner an, läuft aber dann langsam wieder zurück. Die Ausführung geschieht beim dritten Druck auf Sw1 oder Sw 2. Achtung! Control Prog beginnt mit 4- facher Geschwindigkeit, der Rücklauf aber mit der eingestellten Geschwindigkeit.</p>	1
7	<p>Automatisches lineares Scannen mit Rücklauf samt Fortsetzung mit normalem Scannen</p> 	<p>Gehen Sie bis zu der Taste, die eine Scannsequenz enthält und aktivieren Sie diese. Control Prog steigert automatisch in der Ordnung wie die Sequenz gestaltet wurde. Beim zweiten Druck hält der Scanner an, läuft aber dann langsam wieder zurück. Die Ausführung geschieht beim dritten Druck auf Sw1 oder Sw 2. Wird keine Wahl getroffen, wird mit normalem Scannen fortgesetzt. Achtung! Control Prog beginnt mit 4- facher Geschwindigkeit, der Rücklauf aber mit der eingestellten Geschwindigkeit.</p>	1

Zur Erstellung einer individuellen Scannsequenz verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie **P** und ***** gleichzeitig. Die Lampe unter Taste ***** und die Lampe der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf **1**.
3. Drücken Sie auf die Taste, auf der die Sequenz gespeichert werden soll.
4. Wählen Sie die Scannmethode laut Tabelle 5.
5. Drücken Sie die Tasten, die in die Sequenz einbezogen werden sollen.
6. Beenden Sie mit einem langen Druck (ca. 2 Sek.) auf **→|** bis die Lampe der Ebenentaste grün blinkt und erlischt.


Kurzfassung

Erstellung einer individuellen Scannsequenz: **P** + *****, **1**, Speicherplatz wählen, Scannmethode wählen, Sequenz drücken, **→|**.

 **TIPP:** Es besteht die Möglichkeit, eine individuelle Scannsequenz mit Direktsteuerung zu kombinieren. Damit kann z.B. Control Prog immer mit Scannen einer individuellen Scannsequenz beginnen. Die individuelle Scannsequenz kann z.B. wichtige Informationen enthalten wie Alarm, das Telefon aktivieren, die Sprechanlage bedienen und die Tür öffnen. Trifft man keine Wahl für diese Funktionen, fährt der Control Prog mit normalem Scannen fort. Eine der Scannmethoden 1, 3 oder 5 muß dabei eingestellt sein.

Erstellen Sie diese Kombination wie folgt:

Erstellen Sie eine Taste mit einer individuellen Scannsequenz. Wählen Sie danach eine der Scannmethoden 1, 3 oder 5 in dieser Sequenz. Dann legen Sie die Direktsteuerung auf die gleiche Taste. Nun ändern Sie die Anzahl der Scannzyklen auf 1. Control Prog startet nun mit Scannen der Sequenz und wenn keine Wahl getroffen wurde, geht er über zum normalen Scannen.

 **TIPP:** Man kann den Control Prog z.B. so einstellen, daß er nur die Tasten der linken Spalte durchläuft (abscannt). Die mittlere und rechte Spalte kann dann benutzt werden, um die Beschriftung für die verschiedenen Funktionen der linken Tasten vorzunehmen.

Erstellen Sie dieses wie folgt:

Wählen Sie eine Taste für die individuelle Scannsequenz, die nur auf der linken Spalte scannt.

 **HINWEIS:** Die Taste, auf der die Sequenz gespeichert werden soll, darf nicht ein Teil der Sequenz sein.

Wählen Sie jetzt eine der Scannmethoden 0, 2, 4 oder 6 für diese Sequenz. Legen Sie danach die Direktsteuerung auf die gleiche Taste. Control Prog wird nun nur auf der linken Spalte scannen.

Einstellen der Scanngeschwindigkeit

Die Scanngeschwindigkeit kann von 0,1 bis 6,0 Sekunden in Schritten von 0,1 Sekunden programmiert werden. Die Grundeinstellung ist bei Lieferung auf 1,5 Sekunden eingestellt. Verfahren Sie folgendermaßen zum Programmieren der Scanngeschwindigkeit:

1. Drücken Sie auf **P** und **6** gleichzeitig. Die Lampen an der Taste 6 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeit. Beispiel: Um eine Scanngeschwindigkeit von 0,7 Sekunden zu erhalten, drückt man die Taste 7. Um die höchste Geschwindigkeit, 0,1 Sekunden, zu erhalten, drückt man auf 1. Für die niedrigste Geschwindigkeit 6,0 Sekunden drückt man 60. Das heißt, der eingegebene Wert muß mit 10 dividiert werden, um die gewünschte Zeitkonstante rechnerisch zu erhalten.
3. Beenden Sie mit **ESC**. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um anzuzeigen, daß alles richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Scanngeschwindigkeit einstellen: **P** + **6**, **1**.... **6** **0**, **ESC**

Grundeinstellung = 1.5 Sekunden.

Ein/Ausschalten des Turboscanners

Der Turboscanner kann benutzt werden, um die Scanngeschwindigkeit auf das Vierfache zu steigern. Diese Einstellung ist für avancierte Benutzer mit hohen Ansprüchen gedacht. Der Turboscanner geht immer von der eingestellten Scanngeschwindigkeit aus, dividiert diese aber mit dem Faktor 4. Dies ergibt dann eine exaktere Einstellung, besonders im Bereich 0,1 - 1,0 Sekunden, z.B. 0,5 Sekunden dividiert mit 4 ergibt 0,125 Sekunden. Die Lampe des Scanners blinkt nicht, um die Überwachung bei den hohen Geschwindigkeiten zu erleichtern.

Verfahren Sie folgendermaßen, um den Turboscanner ein/auszuschalten:

1. Drücken Sie **P** und **6** gleichzeitig. Die Lampe an Taste 6 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Zum Einschalten des Turbos drücken Sie auf **A** und zum Ausschalten auf **B**. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um anzuzeigen, daß es gelungen ist.

Kurzfassung

Ein/Ausschalten des Turboscanners: **P** + **6**, **A** oder **B**.

Einschalten = **A**, Ausschalten = **B**

Grundeinstellung = Aus.

Einstellung der Anzahl von Scannzyklen

Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Zyklen, die der Control Prog beim Scannen durchlaufen soll, zu bestimmen. Von dem Ausgangspunkt, wo der Scanner begann, bis er zum gleichen Platz wiederkehrt, ist ein Zyklus. Das setzt voraus, daß keine Wahl in der Zwischenzeit getroffen wurde. Es ist möglich zwischen 1 - 4 Zyklen zu wählen.

Verfahren Sie folgendermaßen, um die Anzahl der Zyklen einzustellen:

1. Drücken Sie auf **P** und **7** gleichzeitig. Die Lampen an Taste 7 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf **#**.
3. Wählen Sie die Anzahl der Zyklen 1 - 4. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um anzuzeigen, daß es gelungen ist.

Kurzfassung

Einstellung der Anzahl der Scannzyklen: **P** + **7**, **#**, **1**... **4**

Grundeinstellung = 2 zyklen.

Einstellen des Scannstarts

Mit dem Control Prog kann man bestimmen, wo der Scanner beginnen soll. Bei Zeile 1 - 6 oder bei der Ebenentaste. Zeile 1 = Tasten 1, 2, 3, Zeile 2 = Tasten 4, 5, 6 usw. Wenn die Taste 0 gewählt wird, beginnt das Scannen auf der Ebenentaste. Ein Vorteil dabei ist, daß man schneller zu einer bestimmten Taste gelangt. Der Control Prog ist bei Lieferung auf Zeile 1 eingestellt.

Verfahren Sie folgendermaßen, um den Scannstart einzustellen:

1. Drücken Sie auf **P** und **7** gleichzeitig. Die Lampen der Taste 7 und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Wählen Sie die Zeile durch Druck auf eine der Tasten 0 - 6. Zum Abschluß blinkt die Lampe grün, um anzuzeigen, daß es richtig ausgeführt wurde.

Kurzfassung

Scannbeginn einstellen: **P** + **7**, **0**...**6**

Grundeinstellung = zeile 1.

Ein/ausschalten der Blinkzeichen beim Scannen

Jedesmal, wenn der Control Prog einen Schritt weiter wandert, blinkt die Lampe mehrmals. Einige Benutzer können diese Blinkzeichen als störend und verwirrend empfinden. Nun ist es möglich, diese durch ein stetiges Leuchten zu ersetzen. Nachteilig ist dabei, daß der Control Prog dann 40 % mehr Strom verbraucht. Verfahren Sie folgendermaßen, um das Blinkzeichen ein/auszuschalten:

1. Drücken Sie auf **P** und **6** gleichzeitig. Die Lampen an Taste 6 und der aktuellen Ebene leuchteten nun.
2. Drücken Sie auf ***** zum Einschalten oder auf **#** zum Ausschalten. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um anzuzeigen, daß es gelungen ist.

Kurzfassung

Blinkzeichen ein/ausschalten: **P** + **6**, ***** oder **#**

Einschalten = *****, ausschalten = **#**

Grundeinstellung: Blinkzeichen eingeschaltet.

Direktsteuerung erstellen


Im Control Prog ist es möglich, die Funktionen mit externen Funktionsschaltern direkt zu steuern. Taste 1 z.B. wird mit einem externen Funktionsschalter gesteuert, Taste 2 mit dem nächsten usw. Maximal 9 verschiedene Funktionen können auf diese Weise gesteuert werden. Wenn Sie aber mehr als 5 Funktionen benutzen wollen, müssen Sie einen Joystick verwenden. Es besteht die Möglichkeit 9 Funktionen auf jeder Ebene zu speichern.

Dagegen ist es aber nicht möglich, die Ebenen mit externen Funktionsschaltern zu wählen. Die Ebene kann nur durch Druck auf die Ebenentaste gewählt werden.

Wenn Direktsteuerung eingegeben wird, wählen Sie zuerst auf welchem Platz die erste Funktion gespeichert werden soll, die übrigen Funktionen werden dann automatisch der Reihenfolge nach belegt (Tabelle 3). Es ist möglich, die Anzahl der Funktionen, die benutzt werden sollen, zu begrenzen, indem Sie diese auf die 8 letzten Tasten speichern. Wenn z.B. Direktsteuerung auf Taste D gespeichert wird, wird nur diese Taste aktiviert, unabhängig wie viele Funktionsschalter eingeschaltet werden oder in welche Richtung der Joystick geschaltet wird. Wenn aber dagegen die Direktsteuerung z.B. auf die Taste B gespeichert wird, wird "rechts" die Taste B schalten, "hinunter" Taste C und alle anderen Richtungen die Taste D schalten. Durch Drücken der Taste B wird der Control Prog auf drei Funktionen begrenzt: In diesem Beispiel braucht natürlich kein Joystick benutzt werden, sondern die verschiedenen Richtungen können drei Funktionsschalter entsprechen. In der unteren Tabelle wird gezeigt, welche Richtungen aktiviert werden, die von einem Joystick geschaltet werden. Abhängig ist der Platz, auf dem die Direktsteuerung gespeichert wird. Zum Anschluß der externen Funktionsschalter, siehe Abschnitt: *Anschließen der externen Funktionsschalter*.

Tabelle 6: Tasten, die aktiviert werden, abhängig vom gewählten Speicherplatz


Speicherplatz	Anzahl der Funktionen	8	9	0	*	#	A	B	C	D
8	9 funk. (maximalt)	→	↓	←	↑	Enter	↘	↙	↖	↗
9	8 funk.		→	↓	←	↑	Enter	↘	↙	↖, ↗
0	7 funk.			→	↓	←	↑	Enter	↘	↖, ↗, ↘
*	6 funk.				→	↓	←	↑	Enter	↘, ↙, ↖, ↗
#	5 funk.					→	↓	←	↑	Enter, ↘, ↙, ↖, ↗
A	4 funk.						→	↓	←	↑, Enter, ↘, ↙, ↖, ↗
B	3 funk.							→	↓	←, ↑, Enter, ↘, ↙, ↖, ↗
C	2 funk.								→	↓, ←, ↑, Enter, ↘, ↙, ↖, ↗
D	1 funk.									→, ↓, ↑, ←, Enter, ↘, ↙, ↖, ↗

 **TIPP:** Es besteht auch die Möglichkeit, die Direktsteuerung mit der individuellen Scannsequenz zu kombinieren. Lesen Sie bitte dazu auch diesen Abschnitt!

Zur Erstellung/Löschung der Direktsteuerung verfahren Sie folgendermaßen:

1. Drücken Sie auf **P** und ***** gleichzeitig. Die Lampe an ***** und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie **0**.
3. Wählen Sie die Ebene und drücken dann die Taste, wo die erste Funktion gespeichert werden soll. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um anzuzeigen, daß es gelungen ist.

Die übrigen Funktionen werden automatisch und in Reihenfolge laut Tabelle 3 und Fig 5 eingespeichert.

Wenn eine Direktsteuerung gelöscht werden soll, drücken Sie lange (ca. 2 Sek.) auf  bis die Lampe der Ebenentaste erlischt.

Kurzfassung

Direktsteuerung erstellen: **P** + *****, **0**, Ebene wählen, Speicherplatz wählen

Direktsteuerung löschen: **P** + *****, **0**, Ebene wählen, 

Remote Scan erstellen

Manchmal kann es schwer sein, Funktionen zu steuern, die ein schnelles Wechseln von Kanälen erfordern oder Wiederholungen eines Kanals unter kürzerer Zeit und gleichzeitig den Scanner zu benutzen, um z.B. Funktionen an einem Blattwendergerät zu steuern. Mit dem normalen Scanner am Control Prog ist dieses ziemlich schwer. Wenn aber Remote Scan gewählt wird, ist es möglich, das Blattwendergerät oder andere Applikationen anzuschließen. Remote Scan kann immer auf eine wahlfreie Taste gespeichert werden. Wenn man diese Taste, entweder durch Druck auf die Taste aktiviert oder bis zu dieser Taste scannt, erreicht man eine Lage die es ermöglicht, direkt die Tasten 1 – 9 mit einem Joystick oder externen Funktionsschaltern zu steuern. Man kann in dieser Lage verbleiben, bis man freiwillig eine andere Einstellung wählt. Es werden immer die Tasten 1 - 9 auf der gleichen Ebene aktiviert, die Remote Scan gespeichert hat. Maximal 9 Funktionen können auf diese Weise gesteuert werden. Wenn mehr als 5 Funktionen gesteuert werden sollen, wird ein Joystick benötigt. In der Tabelle 7 wird aufgeführt, welche Tasten aktiviert werden, abhängig von der Richtung in welche der Joystick geführt wird. Es besteht immer die Möglichkeit, diese Tasten mit neuen Kanälen/Code zu speichern. Die Lampen auf den Tasten 1 - 9 blinken, wenn ein Joystick in verschiedene Richtungen geführt wird. Beachten Sie auch den Abschnitt: *Anschließen der externen Funktionsschalter*.

Tabelle 7: Richtung mit Joystick

Anzahl der Funktionen	Richtung mit Joystick	Taste, die aktiviert wird
1	→	6
2	↓	8
3	←	4
4	↑	2
5	Enter	5
6	↘	9
7	↙	7
8	↖	1
9	↗	3

Die Funktionen 1-5 können mit Einfunktionsschaltern ersetzt werden.

Es gibt zwei verschiedene Einstellungen im Control Prog, die bestimmt werden müssen wenn Remote Scan einprogrammiert wird; Ausschaltzeit und Time-out.

Ausschaltzeit: Dies ist die benötigte Zeit, um den Modus Remote Scan zu verlassen (1 - 25 Sek. empfohlene Einstellung 5 Sek.). Wenn der Funktionsschalter gedrückt gehalten wird oder der Joystick konstant in eine Richtung, in der eingestellten Zeit, gehalten wird, verläßt Control Prog den Modus Remote Scan.

Time-out: Dies ist die benötigte Zeit, bevor Control Prog automatisch den Modus Remote Scan verläßt (1 - 255 Sek., empfohlene Einstellung 240 Sek.).

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Remote Scan zu erstellen:

- Automatische Einstellung der Grundwerte für Ausschaltzeit (5 Sek.) und Time-out (240 Sek.).
- Manuelle Einstellung für Ausschaltzeit und Time-out.

Verfahren Sie folgendermaßen, um Remote Scan mit automatischer Einstellung zu erstellen:

1. Drücken Sie auf **P** und ***** gleichzeitig. Die Lampen an Taste ***** und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf **2**.
3. Wählen Sie nun die Ebene und drücken Sie auf die Taste, auf der die Funktion gespeichert werden soll.
4. Beenden Sie mit einem Druck auf **↵**. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um die gelungene Ausführung anzuzeigen.
Testen Sie nun, indem Sie bis zu der Taste scannen oder auf die Taste drücken, auf der Remote Scan gespeichert wurde. Wenn jetzt ein Joystick angeschaltet ist, kann man direkt die Tasten 1 - 9 steuern.

Verfahren Sie folgendermaßen, um Remote Scan mit manueller Einstellung zu erstellen:

1. Drücken Sie auf **P** und ***** gleichzeitig. Die Lampen an Taste ***** und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf **2**.
3. Wählen Sie nun die Ebene und drücken Sie auf die Taste, auf der die Funktion gespeichert werden soll.
4. Bestimmen und geben Sie nun die Ausschaltzeit ein (1 - 25 Sek.).
5. Drücken Sie auf **↵**.
6. Bestimmen und geben Sie nun die Zeit für Time-out ein (1 - 255 Sek.).
7. Beenden Sie mit einem Druck auf **↵**. Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um die gelungene Ausführung anzuzeigen.
8. Testen Sie nun, indem Sie bis zu der Taste scannen oder auf die Taste drücken, auf der Remote Scan gespeichert wurde. Wenn jetzt ein Joystick angeschlossen ist, kann man direkt die Tasten 1 - 9 steuern.

Kurzfassung

Remote Scan mit automatischer Einstellung erstellen:

P + *****, **2**, Ebene wählen, Speicherplatz wählen, **↵**.

Remote Scan mit manueller Einstellung erstellen:

P + *****, **2**, Ebene wählen, Speicherplatz wählen, Ausschaltzeit wählen, **↵**. Time-out wählen, **↵**.

Maussteuerung erstellen

Mit Control Prog besteht die Möglichkeit, die Maus an einem PC zu steuern. Das bedeutet, daß man den Cursor in acht verschiedene Richtungen bewegen kann, die Maustaste drücken oder gedrückt halten kann. Die Maussteuerung kann auf eine wahlfreie Taste auf dem Control Prog gespeichert werden. Wenn diese Taste aktiviert wird, entweder durch Druck darauf oder zu dieser gescannt wird, gelangt man in einen Modus, wo die Maus direkt von einem Joystick gesteuert werden kann. Man kann in diesem Modus verbleiben, bis Sie ihn freiwillig verlassen. Die Lampen der Tasten 1 - 9 blinken, wenn ein Joystick in verschiedene Richtungen geführt wird. Um die Maus steuern zu können, wird ein Access PC


Interface benötigt, das an den Computer angeschlossen ist. Zur Installation lesen Sie bitte im Handbuch für Access PC Interface. Lesen Sie auch den Abschnitt: Anschließen der externen Funktionsschalter. Sie müssen vier verschiedene Einstellungen im Control Prog bestimmen, wenn die Maussteuerung erstellt werden soll; ID-Code, Sperrzeit, Ausschaltzeit und Time-out.

ID-Code: Wird auf die gleiche Weise eingestellt wie beim Access PC Interface (0-15, A-F entspricht. 11-16).

Sperrzeit: Dies ist die Zeit, die benötigt wird, bis der Schalter an einer Standardmaus in gedrückter Position blockiert wird. Gesperrt wird mit der Enter- Funktion, (0,1-25,5 Sek. empfohlene Einstellung 1,5 Sek.). Aufsperrern geschieht mit schnellem Druck auf Enter.

Ausschaltzeit: Dies ist die Zeit, die benötigt wird, um den Modus Maussteuerung zu verlassen (1-25 Sek. empfohlene Einstellung 5 Sek.). Wird die Maus innerhalb der eingestellten Zeit stetig in die gleiche Richtung geführt, verläßt Control Prog den Modus.

Time-out: Dies ist die Zeit, die benötigt wird, bis der Control Prog automatisch den Modus verläßt (1-255 Sek. Standart Einstellung 240 Sek.).

 **HINWEIS:** Die Sperrzeit muß kürzer eingestellt sein als die Ausschaltzeit, diese wiederum muß kürzer als Time-out sein.






Folgende Einstellungen müssen im Steuerpanel in Windows XP vorgenommen werden:

Numerische Tastatur: Unter: Einstellungen/Systemsteuerung /Eingabehilfen/Maus muß das Feld "Tastaturmaus aktivieren" angekreuzt werden. Hier können Sie auch unter „Einstellungen“ die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Mauszeigers einstellen.







Es gibt zwei Möglichkeiten, die Maussteuerung zu erstellen:



- Mit automatischer Einstellung der Standardwerte für ID-Code (0), Sperrzeit (1,5 Sek.), Ausschaltzeit (5 Sek.) und Time-out (240 Sek.)
- Mit manueller Einstellung von ID-Code, Sperrzeit, Ausschaltzeit und Time-out.

Verfahren Sie folgendermaßen, um Maussteuerung mit automatischer Einstellung zu erstellen:

1. Drücken Sie auf  und  gleichzeitig. Die Lampen an Taste  und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf .
3. Wählen und drücken Sie die Taste, wo die Maussteuerung gespeichert werden soll.
4. Beenden Sie durch Druck auf . Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün um die gelungene Ausführung anzuzeigen.

Verfahren Sie folgendermaßen, um Maussteuerung mit manueller Einstellung zu erstellen:

1. Drücken Sie gleichzeitig auf  und . Die Lampen an Taste  und der aktuellen Ebene leuchten nun.
2. Drücken Sie auf .
3. Wählen und drücken Sie die Taste, wo die Maussteuerung gespeichert werden soll.
4. Geben Sie nun den ID-Code ein, auf den das Access PC Interface eingestellt ist (0-16).
5. Drücken Sie auf .
6. Wählen und geben Sie die Sperrzeit ein (0,1-25,5 Sek.). Wenn die Zeit 1,5 Sek. gewünscht wird drücken Sie 15 oder 150 wenn 15 Sek. gewünscht werden.
7. Drücken Sie auf .
8. Wählen und geben Sie die Ausschaltzeit ein (1-25 Sek.).

9. Drücken Sie auf .
10. Wählen und geben Sie die Zeit für Time-out ein (1-255 Sek.)
11. Beenden Sie durch Druck auf . Die Lampe der Ebenentaste blinkt grün, um die gelungene Ausführung anzuzeigen.

Einstellungen, die im Computer vorgenommen werden:

1. Unter: Einstellungen/Systemsteuerung /Eingabehilfen/Maus muß das Feld "Tastaturmaus aktivieren" angekreuzt werden. Hier können Sie auch unter „Einstellungen“ die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Mauszeigers einstellen. Wählen Sie weiterhin unter der Einstellung: "Maustaste wenn NumLock aus ist":
2. Justieren Sie wenn nötig die Geschwindigkeit des Mauszeigers.
3. Vergewissern Sie sich, daß NumLock nicht an der Tastatur des Computers aktiviert ist.
4. Kontrollieren Sie, daß die linke Taste der Maus aktiviert ist. Auf dem Bildschirm ganz unten rechts wird ein Bild einer Maus gezeigt. Dort kann man sehen, welche Maustaste eingeschaltet ist. Eine Änderung kann vorgenommen werden an der Tastatur des Computers mit den Tasten (+), (*), (-) die neben der Taste NumLock sitzen.








Wenn die Einstellung richtig vorgenommen wurde, kann nun der Cursor auf dem Bildschirm des Computers in verschiedene Richtungen bewegt werden, indem Sie die Pfeiltasten auf der Tastatur des Computers drücken.

Kurzfassung

Maussteuerung mit automatischer Einstellung erstellen:

 + , , Speicherplatz wählen, .

Maussteuerung mit manueller Einstellung erstellen:

 + , , Speicherplatz wählen, ID-Code wählen, , Sperrzeit wählen, , Ausschaltzeit wählen, , Time-out wählen, .

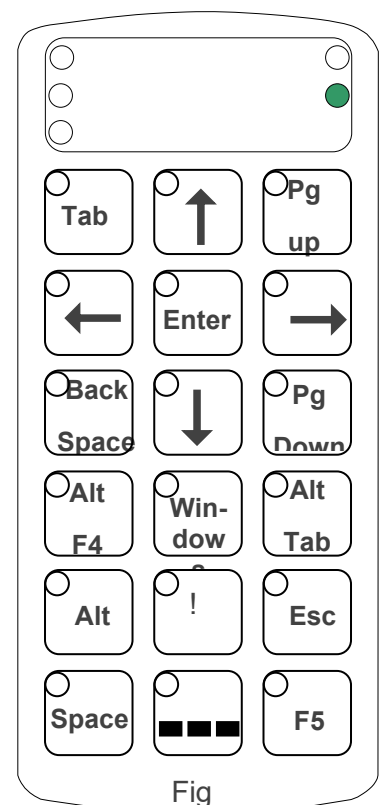
Übrige Computersteuerung

Mit Control Prog können Sie drahtlos alle Funktionen einer gewöhnlichen Computer- Tastatur steuern. Auf der Ebene 10 finden Sie einige vorinstallierte, allgemeine Funktionen. Sie können aber wahlfreie Funktionen auf jede beliebige Ebene und Taste speichern. Dazu muß Control Prog an den Computer angeschlossen sein und das Programm Gewa Control Tool (auf der beiliegenden CD) installiert sein.

Schließen ein Computerkabel (Art. Nr.: 425618) an Control Prog (Fig 8) an und das andere Ende an den Com- Ausgang des Computers. Zum Anschluß an den USB- Ausgang ist ein Adapter (Art.Nr:425620) erhältlich.

Fig 9 zeigt welche verschiedenen Funktionen auf der Ebene 10 vorinstalliert wurden.

Zum Steuern der Tastaturfunktionen ist ein Access PC Interface (Art. Nr.: 6632) erforderlich, der an den Computer angeschlossen werden muß. Zur Installation lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung für Access PC Interface.



Anschluß an den Relaisausgang

Control Prog besitzt zwei Relaisausgänge, die durch Druck auf die codierte Taste aktiviert werden. Dadurch kann zum Beispiel ein Funksender angeschlossen werden, der dann eine Alarmfunktion ausführt. Der Anschluß geschieht an den Eingängen der Funktionsschalter (Fig 8). Jedesmal, wenn die codierte Taste gedrückt wird, werden die Relaisfunktionen parallel aktiviert.

Klinkenstecker 3,5 mm, 4-Pol

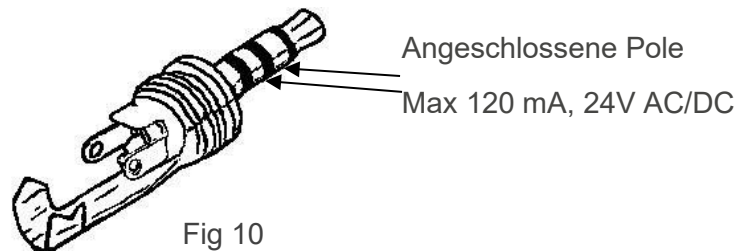



Fig 10

 **TIPP:** Wenn Sie den codierten Kanal benutzen, um z.B. eine Eingangstür zu öffnen aber auch den Relaisausgang benutzen wollen ohne gleichzeitig die Tür zu öffnen, sollten Sie den codierten Kanal auf eine andere Taste kopieren. Dann können Sie einen neuen Code erstellen, der nicht die Tür öffnet, aber die Relaisausgänge aktiviert.

Kurzfassungen gesammelt

Ebene öffnen/schließen

P + **---**, Ebene wählen, **1** oder **2**..... **---**→

Öffnen = **1** schließen = **2**

Ebenen 1-10 gleichzeitig öffnen: **P** + **---**, **A**

Ebenen 1-15 gleichzeitig öffnen: **P** + **---**, **B**

Grundeinstellung = Ebene 2 geöffnet.

Kanäle einlernen

P + **1**, **X**, **Y**,.....**---**

Ebene sichern /entsichern

P + **---**, Ebene wählen, **3** oder **4**..... **---**→

Sichern = **3**, entsichern = **4**.

Wiederherstellung der Grundeinstellung

Wiederherstellung einer Taste:

Ebene wählen, **P** + **3**, wähle **X**

Wiederherstellung einer Ebene:

Ebene wählen **P**+ **3**, **---**, **1**, **2**, **3**, **---**

Wiederherstellung aller Ebenen und übrige Grundeinstellungen:

P + **3**, **!**, **1**, **2**, **3**, **---**

Übertragung von Daten zwischen zwei Sendern

P + **D**

Transportsperre

Ein: **P** + **0**

Aus: **P**

4096-Code einstellen

P + **!**, **0**.... **4 0 9 5**, **---**

Grundeinstellung = Zufallscode.

Binärer 4096-Code erstellen

P + **!**,

"On"- Position = **!** "OFF"- Position = **---**

Grundeinstellung = Zufallscode.

Code kopieren

Ebene wählen, wähle **X**, Ebene wählen, **P** + **8**, wähle **Y**

Ein- / Ausschalten der akustischen Ebenenanzeige

Einschalten: **P** + **4**, *****

Ausschalten: **P** + **4**, **#**

Grundeinstellung = ausgeschaltet.

Anschlagsverzögerung einstellen

P + **2**, **0**...**9**

Grundeinstellung = 0.

Erstellen von automatischen Sequenzen (Makro)

P + **A**, Sequenz eingeben, Ebene wählen, **P** + **B**, Speicherplatz wählen

Erstellung einer manuellen Sequenz

P + **A**, Sequenz eingeben, Ebene wählen, **P** + **C**, **B**, Speicherplatz wählen

Direktwahltaste erstellen

Wählen Sie die Ebene, die mit der Direktwahltaste erreicht werden soll, **P** + **A**, danach die Ebene wählen, wo die Direktwahltaste gespeichert werden soll, **P** + **B**, abschließend Druck auf die gewünschte Direktwahltaste

Einschalten/ausschalten der automatischen Rückstellung zur Grundebene

P + **5**, **5** oder **6**

Einschalten = **5**, ausschalten = **6**

Grundeinstellung = ausgeschaltet.

Scannalternativen einstellen

P + **5**, Scannmethode wählen (Tabelle 4)

Grundeinstellung = 6.

Individuelle Scannsequenz erstellen

P + *****, **1**, Speicherplatz wählen, Scannmethode wählen (Tabelle 5), Sequenz drücken, **→**

Scangeschwindigkeit einstellen

P + **6**, **1**...**6** **0**, **5**

Grundeinstellung = 15.

Ein/Ausschalten des Turboscanners

P + **6**, **A** oder **B**

Einschalten = **A**, Ausschalten = **B**

Grundeinstellung: = aus.

Einstellung der Anzahl von Scannzyklen

P + **7**, **#**, **1**...**4**

Grundeinstellung: =2 zyklen.

Scannstart einstellen

P + **7**, **0**...**6**

Grundeinstellung = zeile 1.

Ein/ausschalten der Blinkzeichen beim Scannen

P + **6**, ***** oder **#**

Einschalten = *****, ausschalten = **#**

Grundeinstellung = Blinkzeichen eingeschaltet.

Direktsteuerung erstellen

Erstellen: **P** + *****, **0**, Ebene wählen, Speicherplatz für die erste Funktion wählen

Löschen: **P** + *****, **0**, Ebene wählen, **→**

Remote Scan erstellen

Manuelle Einstellung erstellen:

P + *****, **2**, Ebene wählen, Speicherplatz wählen, Ausschaltzeit wählen, **---**. Time-out wählen, **---**

Automatische Einstellung erstellen:

P + *****, **2**, Ebene wählen, Speicherplatz wählen, **---**

Maussteuerung erstellen

Manuelle Einstellung erstellen:

P + *****, **3**, Speicherplatz wählen, ID-Code wählen, **---**, Sperrzeit wählen, **---**, Ausschaltzeit wählen, **---**, Time-out wählen, **---**

Automatische Einstellung erstellen:

P + *****, **3**, Speicherplatz wählen, **---**

Wartung

Der Control Prog darf nur mit einem leicht feuchten Lappen, der in milde Seifenlauge getaucht wurde, gereinigt werden. Danach mit einem Tuch abtrocknen.

Wenn der Control Prog an einem Computer angeschlossen ist, diesen unbedingt vor der Reinigung ausschalten.

Lagerung und Entsorgung

Lagerung

Lagern Sie das Produkt in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.

Entsorgung



Control Prog enthält elektronische Komponente und soll nach Ende der Lebensdauer wiederverwertet werden. Beim Umweltdepot verwerten.

Produktspezifikationen

Stromverbrauch in Ruhestellung	Ca 12 μ A
Stromverbrauch beim Scannen	Ca 5 mA
Stromverbrauch bei Sendung	Ca 35 mA (GewaLink-Kanal)
Max. Belastung Relaisausgänge	Max. 120 mA, 24V AC/DC
Relaisausgänge Type	3,5 mm Klinkenstecker 4- Pol
Eingang Funktionsschalter Type	3,5 mm Klinkenstecker 2- Pol
Batterielebensdauer (im Scannbetrieb)	Ca 250 Tage (100 mal Scannen/Tag und 100 Sek. Sendung/Tag mit GewaLink-Kanal)
Batterielebensdauer (im Tastenbetrieb)	Ca 2 Jahre (100 Sek. Sendung/Tag mit GewaLink-Kanal)
Programmierplätze	241
Druckkraft auf Tastatur	< 1 N (100 gr)
Reichweite:	20-30 Meter (GewaLink-Kanäle)
EMC-Standard Emission " Immunität	EN 61000-6-4:2001, EN60601-1-1-2:2001 EN 61000-6-2:2001, EN60601-1-1-2:2001
Computer- Anschluß	RS-232 kompatibles Spannungsniveau, 9600 Bits/s, 8 Data Bits, keine Parität, 2 Stop Bits
Abmessungen (L x B x H)	134 x 70 x 25 mm
Gewicht inkl. Batterien	180 gr
Temperaturbereich exkl. Batterien	-20 ⁰ - +45 ⁰ C
Geschätzte Lebensdauer	5 Jahre

Weitere Informationen zu Control Prog und Zubehör finden Sie unter www.abilia.com.

Wichtige Informationen

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und verstehen.

Sicherheitsdefinitionen

⚠️ WARNUNG: Verletzungs- oder Todesgefahr bei Nichtbeachtung der Anweisungen.

⚠️ ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann das Produkt beschädigt werden.

ℹ️ HINWEIS: Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

Sicherheitshinweise vor Verwendung von Control Prog

⚠️ WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Der Gleitverschluß der Kordel ist ein Sicherheitsdetail, das ein Erdrosseln verhindert wenn sich der Sender irgendwo verfangen sollte. Kontrollieren Sie, daß die Enden der Kordel leicht herausgezogen werden können. Knoten Sie niemals die Halskordel.

Schwere Vorfälle

Sollte im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegendes Vorkommnis auftreten, muss dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Ein Vorfall gilt als schwerwiegend, wenn er direkt oder indirekt geführt hat, geführt haben könnte oder hätte führen können zu Tod eines Anwenders oder einer anderen Person, vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Anwenders oder einer anderen Person oder eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Konformität mit den Anforderungen für Medizinprodukte

Control Prog wird als technische Hilfe für Personen mit Behinderungen vermarktet und erfüllt alle notwendigen Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien für Medizinprodukte.

Produkthaftung

Das Produkt wurde gemäß ISO 14971 entwickelt und auf Risiken bewertet. Die Gebrauchsanweisung und die technischen Spezifikationen wurden gemäß den Sicherheitsbewertungen in der Risikoanalyse erstellt. Berücksichtigen Sie immer die Sicherheit, wenn Sie das Produkt verwenden. Abilia AB kann nicht für Folgen einer unsachgemäßen Verwendung oder Installation des Produkts verantwortlich gemacht werden. Jegliche Beschädigung oder jeder Missbrauch des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie und zur Befreiung des Herstellers von der Haftung. Die geschätzte Lebensdauer des Produkts ist gültig, wenn es gemäß den Verwendungszweck- und Wartungsanweisungen verwendet wird.

Kontaktinformation

Schweden:

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norwegen:

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Vereinigtes Königreich:

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International:

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

